

ONEBITE



ÉTAPES DE MONTAGE - French

1. Desserrer suffisamment l'écrou de manière à pouvoir positionner la barre d'axe horizontal selon un angle à 90° par rapport à la barre d'axe médian. Mettre la barre en place sur les picots et resserrer légèrement l'écrou.
2. Faire coulisser l'arc sur l'attache centrale, le côté le plus long de la barre d'axe médian dirigé vers le haut et la barre d'axe horizontal parallèle à l'arc.
3. Si la barre d'axe médian se trouve trop proche du nez du patient, utiliser l'extension entre l'arc et les barres, afin de ménager plus d'espace. Veiller à garder cette extension au cabinet pour d'autres cas.
4. Appliquer le matériau d'enregistrement de l'occlusion sur l'arcade inférieure du patient ainsi que sur l'arc OneBite. Demander au patient de fermer la bouche sur l'arc et laisser le matériau durcir complètement.
5. Une position idéalement bloquée selon un angle à 90° est alors obtenue pour les visages symétriques, ajuster les barres d'axes horizontal et médian selon les caractéristiques faciales.
6. Dans le cas de caractéristiques faciales asymétriques, une manipulation préalable permet aux barres d'axes un mouvement indépendant l'une de l'autre. Retirer l'écrou, retourner sur elle-même la barre d'axe horizontal, picots face à l'écrou. Replacer l'écrou et le resserrer.
7. Une fois l'enregistrement occlusal finalisé, serrer fermement l'écrou.
8. Afin de préserver de manière permanente l'enregistrement occlusal, appliquer le matériau d'enregistrement dans les espaces autour de l'écrou et en son centre.
9. Pour le transport du OneBite, veiller à détacher l'arc des barres d'axes, une fois l'enregistrement sécurisé.

Pour plus d'informations ou vidéo de démonstration :
telephone: 866.668.BITE | www.onebite.com

onebite®



PRECISION DENTAL PRODUCTS



EC REP

Financière de Participation - Quartier de l'Opéra
13680 Lançon de Provence - France -
telephone: +33490429292



13925 S. Maple Hollow Circle
Draper, UT. 84020, United States

OneBite V1 04/2015