

PRECAUTIONS

Les porte-empreintes sont à usage unique et doivent être utilisés selon les règles habituelles d'usage.

Ⓢ Ne jamais réutiliser un porte-empreinte.

Ne pas jeter les porte-empreintes dans la nature afin de préserver l'environnement. Tenir le système complet à température ambiante.

REFERENCES

Réassorts (36 P.E.)		Perforés		Pleins	
Taille	Couleur	Haut	Bas	Haut	Bas
1	Oranges	DS 006	DS 009	DS 029	DS 032
2	Bleus	DS 007	DS 010	DS 030	DS 033
3	Jaunes	DS 008	DS 011	DS 031	DS 034

Manches inox (3)		Standards		Implants	
Taille	Couleur	Haut	Bas	Haut	Bas
1	Oranges	DS 012	DS 015	DS 018	DS 021
2	Bleus	DS 013	DS 016	DS 019	DS 022
3	Jaunes	DS 014	DS 017	DS 020	DS 023

DS 001 : Starter Kit (72 P.E. assortis perforés et 6 manches inox)

DS 027 : Starter Kit (72 P.E. assortis pleins et 6 manches inox)

Contenu : 12 P.E. perforés ou pleins de chaque taille (haut et bas)

1 manche inox de chaque taille (haut et bas)

DS 002 : Starter Kit Implants (72 P.E. assortis perforés et 12 manches inox)

DS 028 : Starter Kit Implants (72 P.E. assortis pleins et 12 manches inox)

Contenu : 12 P.E. perforés ou pleins de chaque taille (haut et bas)

1 manche inox de chaque taille (haut et bas)

1 manche inox Implants de chaque taille (haut et bas)

DS 004 : Manches inox assortis (1 manche inox de chaque taille (haut et bas))

DS 005 : Manches inox Implants assortis (1 manche inox de chaque taille (haut et bas))

DS 025 : Adhésif universel Vega (flacon 30 ml)

Distribué par **bisico**
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
Tél. : 04 90 42 92 92
Fax : 04 90 42 92 61
www.bisico.fr

Fabriqué par
DTS INTERNATIONAL
Via Molino Delle Lime, 4 / E
10064 PINEROLO (TO) - ITALY
Tél. : 00 39 0121 37 74 59
Fax : 00 39 0121 32 36 55

P.E pleins ou perforés à usage unique DTS

*Porte-empreintes à usage unique
(manches en inox)*



Mode d'emploi

Distribué par
bisico

Fabriqué par
DTS
INTERNATIONAL

1



Sélectionnez le porte-empreinte en fonction de l'arcade à enregistrer (Maxillaire ou Mandibule) et de sa taille.

2



Choisissez le manche correspondant marqué d'une pastille de la couleur du porte-empreinte (grande pour le haut, petite pour le bas).

4

Appliquez le matériau à empreinte et remplissez complètement le porte-empreinte, puis procédez à la prise d'empreinte.

5

Après prise ou polymérisation du matériau à empreinte et désinsertion, retournez le porte-empreinte et retirez le manche selon le mouvement opposé à celui de son insertion.

3



- Retournez le porte-empreinte afin que l'extrados soit vers le haut et le manche afin que la pastille soit vers le bas.
- Présentez le porte-empreinte au-dessus du manche métallique, en faisant correspondre les 3 ergots face aux logements correspondants, puis insérez le porte-empreinte sur le support.
- Une fois en place, faites glisser le manche vers l'avant afin de bloquer les deux parties ensemble.

Note : L'adhésif universel Vega peut être utilisé en option afin de majorer la rétention avec les P.E. perforés.

Celui-ci s'avère par contre indispensable avec les P.E. pleins (référence individuelle à commander séparément).

Étaler au pinceau en couche fine sur toute la surface du P.E. Laisser sécher 1 à 2 minutes avant remplissage avec le matériau à empreinte.

6



Si nécessaire, le porte-empreinte peut être modifié et modelé à la chaleur après insertion sur son support.

Après durcissement du matériau à empreinte, détachez la partie plastique du manche métallique.

Le manche peut être réutilisé après stérilisation à l'autoclave.