

Matériau d'enregistrement occlusal pour scannage optique

Regidur scan est un matériau extrêmement dur et à prise rapide pour l'enregistrement occlusal destiné à un scannage optique, comme par exemple avec la caméra CEREC®.

Regidur scan est un silicone par addition et peut être directement appliqué sur les surfaces dentaires grâce à son conditionnement en cartouche.

Regidur scan peut être utilisé pour l'enregistrement des relations inter-arcades, mais également en tant que matériau pour réalisation de clés ou enregistrement des préparations avec tenons. Il peut aussi être utilisé pour les enregistrements à l'aide d'un arc facial.

Regidur scan peut être facilement retaillé ou meulé grâce à sa très haute dureté finale.

Grâce à sa thixotropie, il ne coule pas au niveau des espaces interdentaires et se dépose facilement, rendant son application particulièrement facile.

Préparation de la cartouche

Placer la cartouche sur le pistolet. Enlever le bouchon de la cartouche et y fixer une buse d'automélange pour une application directe immédiate.

Enregistrement de l'occlusion

Le matériau est automatiquement mélangé et directement appliqué sur les surfaces occlusales à enregistrer. L'enregistrement doit être effectué au maximum 20 secondes après le début de mélange (Temps de travail ou d'application à 23°C ou 74°F). Le temps recommandé en bouche est d'environ 1:15 minute.

Notes

Laisser la buse d'automélange sur la cartouche après utilisation. Ne pas réutiliser le bouchon de la cartouche. Le fait de refermer la cartouche à l'aide de son bouchon entre deux utilisations peut entraîner une contamination des composants et une polymérisation dans la cartouche.

Eviter le contact du produit avec du latex ou des gants contenant des polymères sulfurés. Ne pas toucher les dents préparées avec des gants.

Articulateur

Regidur scan permet un contrôle visuel lors de la mise en place du modèle en plâtre sur l'articulateur. Les enregistrements réalisés avec **Regidur scan** peuvent être conservés plusieurs mois sans risque de déformation.

Conservation

Ne pas conserver à plus de 25°C (78°F). Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Garantie

BISICO garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de fabrication. BISICO ne peut être tenu responsable des conséquences liées à une utilisation non-conforme de ce produit. L'utilisateur est responsable de la détermination et du bon choix de ce produit pour son application. En cas de défectuosité avérée dans le cadre de la garantie, la responsabilité de BISICO se limite au remplacement du produit.

Tenir hors de portée des enfants ! Exclusivement réservé à l'usage dentaire.

CEREC® est une marque déposée de Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Allemagne.

Conditionnement

BISICO Regidur scan Réf. : 71560
3 cartouches de 50 ml, 18 buses d'automélange roses

BISICO Regidur scan Réf. : 71565
1 cartouche de 50 ml, 6 buses d'automélange roses



65295-00.2001