

# Regi-trans

Mode d'emploi 

**Regi-trans** est un **matériau transparent d'enregistrement occlusal** hautement précis ; à base de **polysiloxane de vinyle à réaction de prise par addition**, il offre notamment une utilisation particulièrement simple et un gain de temps lors de la procédure. Sa transparence permet une observation visuelle de l'occlusion.

Dans un autre domaine d'application, il est utilisé pour réaliser des **moules transparents** au travers desquels les composites peuvent être photopolymérisés.

Le conditionnement en **cartouche** de **Regi-trans** permet une application directe et sans bulles sur les surfaces dentaires.

## Instructions d'utilisation

### Préparation de la cartouche

Pour préparer une cartouche, l'introduire dans le pistolet et retirer le capuchon. Ne pas le replacer sur la cartouche, une contamination croisée entre les deux composants pouvant se produire et entraîner la polymérisation prématurée du matériau. Fixer une buse d'automélange turquoise sur la cartouche en la verrouillant par une rotation d'un quart de tour vers la droite. Le matériau peut maintenant être appliqué. La buse d'automélange est laissée sur la cartouche jusqu'à la prochaine utilisation.

### Enregistrement occlusal

Le matériau est automatiquement mélangé et directement appliqué sur les surfaces occlusales à enregistrer. L'enregistrement doit être effectué immédiatement après l'application du matériau, et au plus tard après **25 secondes** (temps de travail ou d'application à 23°C / 74°F). La transparence du silicone permet le contrôle visuel de la position occlusale lors de la fermeture. Le temps recommandé en bouche est d'environ **1:30 minutes**.

### Articulateur

L'enregistrement occlusal transparent permet au Technicien de laboratoire un contrôle visuel précis de l'occlusion lors de la mise en place du modèle en plâtre sur l'articulateur. Le retrait de 0,1 % assure, conjointement à une dureté finale supérieure à 70 shore A, un résultat occlusal parfait.

### Précautions

Aucune mise en garde n'a été rapportée à ce jour. Toutefois, chez les personnes sensibilisées, une réaction allergique ne peut être exclue.

En cas d'ingestion, consulter un médecin si des difficultés surviennent.

En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin si des difficultés surviennent.

Eviter tout contact lors de l'enregistrement, le matériau ne pouvant être éliminé après durcissement.

### Désinfection

Les mordus d'occlusion peuvent être désinfectés à l'aide d'une solution de glutaraldéhyde à 2 % par exemple ou d'autres produits de désinfection. Se reporter aux instructions d'utilisation du fabricant.

### Conservation

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C (78°F) ! Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Les enregistrements réalisés avec **Regi-trans** peuvent être conservés plusieurs mois sans risque de déformation.

### Notes

Eviter le contact du produit avec des **gants en latex ou contenant des polymères sulfurés**. Ne pas toucher les dents préparées avec des gants.

### Garantie

Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de fabrication. L'utilisateur est responsable de la détermination et du bon choix de ce produit pour son application. En cas de défectuosité avérée dans le cadre de la garantie, la responsabilité de Bisico se limite au remplacement du produit.

### Limitation de Responsabilité

Sauf en cas d'interdiction par la loi, Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG ne pourra être tenu responsable de toute perte ou dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs, quel que soit le motif évoqué, y compris une garantie, un contrat, une négligence ou la responsabilité stricte.

### Conditionnement

**Art.-N° 71900** 3 cartouches de 50 ml, 18 buses d'automélange turquoise

### Caractéristiques techniques

Consistance :	heavy
Temps de mélange :	inexistant
Temps de travail :	25 secondes
Temps de prise en bouche :	1:30 min
Dureté finale :	env. 70 shore A
Rétraction linéaire :	max. 0,1 %

### Exclusivement réservé à l'usage dentaire !

Rev.-Nr. : 65500-02.2015

Marquage CE obtenu en Janvier 1997



**Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG**  
Johanneswerkstr. 3  
D-33611 Bielefeld  
Tél. : +49 521 8016800  
Fax : +49 521 8016801  
info@bisico.de  
www.bisico.de

**Distributeur pour la France :**  
**Bisico France**  
120 allée de la Coudoulette  
F-13680 Lançon de Provence  
Tél. : 04 90 42 92 92  
Fax : 04 90 42 92 61  
www.bisico.fr

