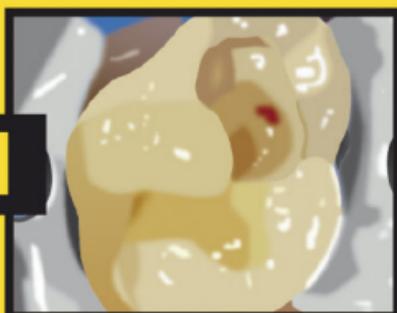


# TheraCal LC<sup>®</sup> Photo-polymérisable

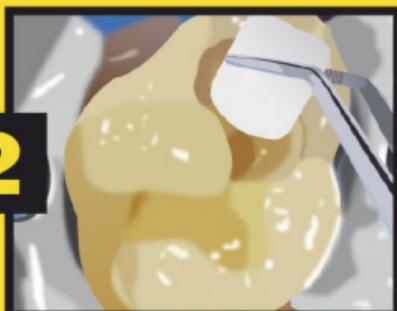
Matériau de coiffage pulpaire  
Liner à base de Silicate de Calcium modifié à la résine

## TECHNIQUE 1

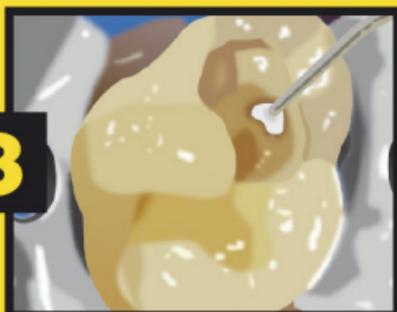
### Expositions Pulpaires (Coiffage Pulpaire Direct)

**1**

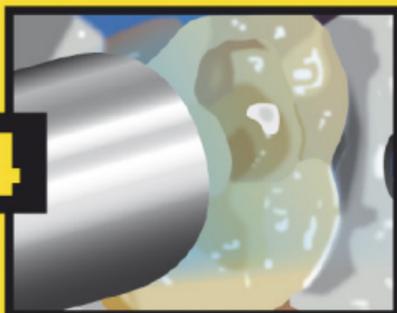
Placer la digue en caoutchouc et terminer la préparation cavitaire.

**2**

Contrôler le saignement en plaçant une boulette de coton humidifiée avec du sérum physiologique stérile. Eponger la préparation avec la boulette de coton. Laisser visiblement humide.

**3**

Appliquer TheraCal LC directement sur la pulpe exposée, par incréments. Les couches ne doivent pas dépasser 1 mm d'épaisseur. Couvrir toutes les zones exposées et faire dépasser TheraCal LC d'au moins 1 mm sur la dentine non-atteinte bordant l'exposition. Photopolymériser entre les couches.

**4**

Photopolymériser chaque couche pendant 20 secondes. Mettre en place l'adhésif, la base et/ou la restauration souhaités suivant les instructions du fabricant. Poursuivre la restauration de la dent.

# TheraCal LC® *Photo-polymérisable*

*Matériau de coiffage pulpaire  
Liner à base de Silicate de Calcium modifié à la résine*

## TECHNIQUE 2

### Préparations Profondes (Coiffage Pulpaire Indirect), Cavités Larges (Liner), Base ou Matériau de scellement des tubules

1



Isoler la dent et réaliser une préparation conventionnelle de cavité. Eliminer toutes les structures dentaires cariées infectées. Laisser la préparation visiblement humide.

2



Appliquer TheraCal LC directement sur le plancher cavitaire, par incréments. Les couches ne doivent pas dépasser 1 mm d'épaisseur. Manipuler en une surface lisse recouvrant toutes les régions profondes de dentine. Photopolymériser entre les couches.

3



Photopolymériser chaque couche pendant 20 secondes. Mettre en place l'adhésif, la base et/ou la restauration souhaités suivant les instructions du fabricant. Poursuivre la restauration de la dent.



 Exclusivement destiné aux professionnels de l'art dentaire.

 BISCO, Inc. • 1100 W. Irving Park Road • Schaumburg, IL 60193 • U.S.A.

Manufacturer

 847-534-6000 • [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

Phone

 BISICO France • 120, allée de la Coudoulette

13680 Lançon de Provence • France •  33-4-90-42-92-92

Phone

Fiche Technique TheraCal LC (ZZ 614) - V3 - 12/2015

Ne tient pas lieu de mode d'emploi - Marquage CE obtenu en Novembre 2011