

Bisco

CE

ACE[®]  **Dispenser**
one and done

Instructions For Use

FR




U.S. Patent 7,748,980

IN-179R2

Rev. 9/12

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT

ACE[®] DISPENSER
Instructions d'utilisation

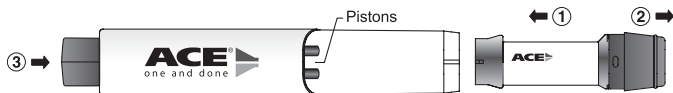

► **POUR CHARGER ET ACTIVER UNE NOUVELLE CARTOUCHE**

NOTE : S'assurer que les deux pistons rouges du Dispenser ACE soient totalement retirés en appuyant sur le bouton « eject » (les pistons ne doivent pas être visibles avant la mise en place de la cartouche).

1. Avec le marquage (étiquette) orienté vers le haut, insérer la cartouche dans le Dispenser ACE.
2. Enlever le capuchon.
3. Appuyer sur le bouton orange de manière répétée jusqu'à obtenir les deux gouttes aux extrémités de la cartouche.

► **DELIVRER LE PRODUIT POUR SON UTILISATION**

1. Positionner les deux ouvertures de la cartouche ACE au-dessus du godet de mélange et appuyer une fois sur le bouton orange. Une proportion correcte du matériau sera délivrée, une goutte devant être exprimée au niveau de chaque extrémité. Si nécessaire, toucher la face interne du puits du godet pour faire tomber les gouttes.
2. Replacer fermement le capuchon sur la cartouche. **Il est recommandé de laisser la cartouche sur le Dispenser ACE jusqu'à sa dernière utilisation.**



► **POUR EJECER LA CARTOUCHE**

1. Pour retirer la cartouche, tourner le Dispenser ACE de manière à ce que le marquage soit orienté vers le bas. Une fois le capuchon enlevé, faire glisser le bouton « eject ».
2. Retirer la cartouche du Dispenser ACE.
3. Jeter le capuchon et la cartouche.
4. Charger une nouvelle cartouche.

DESINFECTIION : Dispenser – Utiliser un spray désinfectant pour surfaces ou des lingettes convenant aux surfaces en plastique, en PVC ou en polycarbonate selon les instructions du fabricant. Vaporiser le spray sur une serviette ou utiliser une lingette désinfectante pré-imprégnée pour nettoyer le Dispenser ACE. Eviter le contact direct de la solution de désinfection avec l'adhésif aux extrémités de la cartouche. Ne pas immerger, ni autoclaver.

Godets de mélange – Faire tremper dans une solution de produits chimiques à froid et compatible avec le polypropylène, selon les instructions du fabricant.

GARANTIE : BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92