

BIOCLEAR POSTERIOR - Mode d'emploi

Indications

Le système de matrices postérieures Bioclear est indiqué pour toutes les restaurations de Classe II. Ce système emploie les anneaux Bioclear Twin Rings, les coins Bioclear Diamond Wedge et les matrices Bioclear Posterior.

Sécurité

Afin d'offrir à vos Patients la procédure la plus sûre et la plus confortable possible, lisez attentivement ces instructions avant utilisation.

Avertissements

Le système de matrices postérieures Bioclear contient des petits composants coupants. L'utilisation d'une digue en caoutchouc est nécessaire pour éviter les risques d'inhalation des composants. L'utilisation de gants et/ou de pinces est recommandée pour éviter les coupures.

Inhalation

Consulter immédiatement un médecin en cas d'inhalation d'un composant.

Coupure

En cas de coupure avec une matrice propre, procéder aux premiers soins, puis jeter la matrice selon la réglementation locale en vigueur. En cas de coupure avec une matrice souillée, suivre les mesures recommandées après une exposition accidentelle, en complément aux premiers soins.

Manipulation

Afin de protéger les Patients des risques de blessure, veiller à exercer un contrôle total et permanent de tous les instruments lors de leur manipulation.

Utiliser EXCLUSIVEMENT les instruments accessoires conçus, fournis et/ou dont l'usage est prévu avec le système de matrices postérieures Bioclear, tels que mentionnés dans ces instructions.

Précautions

Bioclear Matrix met à disposition des instructions pour l'utilisation de ses produits. Toute utilisation non-spécifiée dans ces instructions n'est pas recommandée et engage l'entière responsabilité du Praticien qui la met en œuvre.

Note : Les anneaux Twin Rings sont sous tension. Lors de la mise en place de l'anneau, s'assurer qu'il soit correctement positionné dans la pince avant insertion, puis de sa parfaite tenue autour de la dent avant de retirer la pince.

Conservation

Conservé dans un environnement sec et propre à une température comprise entre 10-24°C/50-75°F, à l'écart de la lumière directe du soleil, de la condensation, d'une humidité excessive, de flammes et autres sources d'ignition.

Les coins et les matrices sont exclusivement à usage unique.

Prendre les précautions appropriées pour le nettoyage et/ou l'élimination des instruments et du matériel contaminés selon les procédures en vigueur destinées aux instruments tranchants.

Hygiène : Eviter les contaminations croisées

Les matrices Bioclear et les coins Diamond Wedges sont EXCLUSIVEMENT à usage unique et doivent être jetés après utilisation de manière appropriée, selon la réglementation locale en vigueur.

Pré-stérilisation

Éliminer au rinçage tout contaminant à la surface de l'anneau Twin Ring.

Utiliser de l'eau chaude et une brosse souple en nylon pour nettoyer délicatement l'anneau, puis rincer à l'eau chaude.

Nettoyage ultrasonique

La plupart des solutions de nettoyage ultrasonique n'altèrent pas l'anneau Twin Ring, et si certaines solutions sont susceptibles d'entraîner une décoloration, cela reste purement esthétique.

Pour y pallier, placer les anneaux dans un récipient contenant de l'eau et une solution détergente, puis placer l'ensemble dans une cuve à ultrasons, ceci évitera que les anneaux ne rentrent en contact avec les produits chimiques.

Laveur désinfecteur automatisé

Les anneaux Twin Rings peuvent également être réutilisés après nettoyage au laveur désinfecteur.

Seuls les appareils approuvés, calibrés et bénéficiant d'une maintenance appropriée doivent être utilisés, conformément aux exigences de la norme ISO 15883-1.

Placer les instruments dans le laveur désinfecteur de telle sorte que l'eau et le détergent puissent entrer et sortir des éventuels orifices.

Suivre les instructions d'utilisation du laveur désinfecteur.

Faire fonctionner le laveur désinfecteur programmé pour une valeur A0 \geq 3000 (par exemple 5 min à 90°C minimum) en utilisant des détergents appropriés. Les instruments peuvent ainsi être traités au laveur désinfecteur jusqu'à 500 cycles.

Stérilisation

Afin d'assurer une stérilisation convenable, tous les instruments doivent être stérilisés à l'autoclave à 134°C/273°F pendant 3 minutes minimum. Les anneaux Twin Rings ne doivent pas être laissés trop longtemps dans l'autoclave pour éviter leur coloration par l'autoclave lui-même.

Note : Ne PAS utiliser de techniques de stérilisation chimiques. La garantie sera annulée en cas d'utilisation de stérilisation chimique. Des méthodes de stérilisation autres que l'autoclave ne sont PAS recommandées par Bioclear Matrix et engagent l'entière responsabilité du Praticien qui les utilise.

Post-stérilisation

Laisser les instruments sécher complètement avant leur stockage. Les pinces ne nécessitent pas d'autre entretien et ne doivent pas être graissées ou lubrifiées.



BIOCLEAR MATRIX SYSTEMS

Par **DR DAVID CLARK LLC**

3402 SOUTH 38TH

TACOMA, WA 98409, USA

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :



120 allée de la Coudoulette
13680 LANCON DE PROVENCE

Tel : 04 90 42 92 92

Svce.commercial@bisico.fr

www.bisico.fr



EMERGO EUROPE

Molenstraat 15

2513 BH, The Hague, The Netherlands



Fabriqué aux Etats-Unis

