

## Nettoyage

- Option 1. Nettoyer les *Strips Dentaires* ContacEZ dans un nettoyeur automatique.
- Option 2. Nettoyer les *Strips Dentaires* ContacEZ à la main.

Etape 1. Tenir un à un les *Strips Dentaires* ContacEZ sous le robinet d'eau courante, et frotter la surface en acier inoxydable à l'aide d'une brosse.



Etape 2. Nettoyer les *Strips Dentaires* ContacEZ en utilisant une solution de nettoyage courante dans une cuve à ultrasons pendant 10 - 20 minutes.



Etape 3. Rincer les *Strips Dentaires* ContacEZ sous le robinet d'eau courante.



## Stérilisation

Etape 1. Stériliser les *Strips Dentaires* ContacEZ à la chaleur humide de l'autoclave (pas de chaleur sèche) à une pression de 30 psi/2,07 bars maximum pendant 7 minutes, et à une température maximum de 273°F/134°C. ContacEZ recommande l'utilisation d'eau distillée dans l'autoclave.



Etape 2. Laisser les *Strips Dentaires* ContacEZ refroidir pendant 5 minutes, une fois la procédure de stérilisation terminée.



Etape 3. Sortir les *Strips Dentaires* ContacEZ de l'autoclave en étant munis de gants. Les strips sont maintenant prêts à l'emploi.



## Elimination

Lorsqu'ils sont usés (plus de particules diamantées à la surface en acier inoxydable du strip), les *Strips Dentaires* ContacEZ peuvent être mis au rebut et éliminés avec les déchets courants.



Brevet déposé

contacez.com



EMERGO EUROPE  
Molenstraat 15  
2513 BH, The Hague  
The Netherlands



ContacEZ, LLC  
217 SE 136th Ave, Suite 105  
Vancouver, WA 98684  
United States

Fiche Technique Nettoyage & Stérilisation des Strips ContacEZ (ZZ 1433) - V2 - 04/2016

Validée par : Dr. Daniel S Kim - License # 251-03-5016