




Français

MODE D'EMPLOI

*rapide · propre · sûr*  
**LE SCHELLEMENT  
INNOVANT**

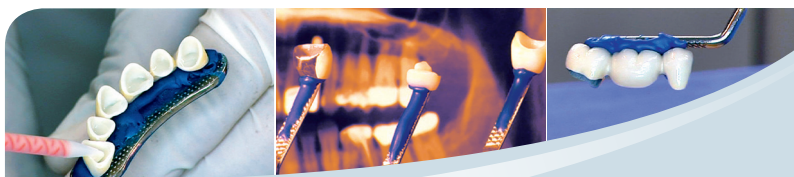

**ZemFix®** est un set d'instruments et de bâtonnets thermoplastiques. Il permet d'insérer en un temps record les couronnes et les bridges.

**Par Dr. Manuel Muñoz**  
Produit breveté (DP 40 27 955)



**8080** Set

**8081** Incisives


**8082** Postérieures (étroit)

**8083** Postérieures (large)





Chauffer rapidement et régulièrement le bâtonnet thermoplastique ZemFix® sous une flamme ouverte.

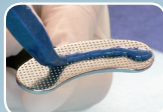

Chauffer la surface de l'instrument un instant. Puis répartir de la masse thermoplastique sur l'instrument.



Dès que la consistance de la masse thermoplastique est ferme, presser l'instrument sur les couronnes.



Maintenir l'instrument en place env. 15-20 secondes et laisser refroidir la masse thermoplastique. Retirer ensuite les couronnes du modèle à l'aide de l'instrument.



Appliquer uniformément le ciment dans toutes les couronnes. Cette action simultanée permet un gain de temps et d'argent.



Toutes les couronnes peuvent être insérées en une seule fois.



Exercer un mouvement de rotation latérale afin de détacher en un "click" les couronnes de la masse thermoplastique ZemFix®.



ZemFix® peut être utilisé pour toutes les restaurations, en couronne simple ou en Inlays.



**Dr. Manuel Muñoz**  
 DVG-Zahnärztbedarft  
 Tel. +49 5604 7997  
 Fax +49 5604 8774  
 info@zemfix.de  
 www.zemfix.de



### Utilisation en implantologie

ZemFix® permet également d'insérer les transferts du modèle exactement et axialement. Il peut être utilisé pour tenir le tour-nevis des vis de fermeture dans des positions où la visibilité est mauvaise, et pour les clés de repositionnement des prothèses hybrides. De plus, ZemFix® s'utilise pour transférer les couronnes d'implant du modèle et les insérer dans leur position initiale sans risquer d'en changer la position.

### REF INFORMATIONS RELATIVE À VOTRE COMMANDE :

#### 8080 Ce set se compose de:

- 1 porte ZemFix® pour les incisives
- 1 porte ZemFix®(étroit) pour les dents postérieures ou les Inlays
- 1 porte ZemFix® (large) pour les dents postérieures, ou une utilisation en écarteur
- 4 bâtonnets ZemFix®

#### 8081 Ce set individuel contient:

- 1 porte ZemFix® pour les incisives
- 2 bâtonnets ZemFix®

#### 8082 Ce set individuel contient:

- 1 porte ZemFix® pour les dents postérieures et Inlays (étroit)
- 2 bâtonnets ZemFix®

#### 8083 Ce set individuel contient:

- 1 porte ZemFix® (large) pour les dents postérieures ou une utilisation en écarteur
- 2 bâtonnets ZemFix®

#### 8084 Bâtonnets ZemFix®

paquet de 12 unités.

#### 8085 Bâtonnets ZemFix®

paquet de 4 unités.

#### 8086 Support ZemFix®

en plexiglas 26x8x2 cm avec 16 perforations pour une organisation optimale lors de l'utilisation, Logo ZemFix® inclus.

ZemFix® est distribué hors Allemagne par:



**Kohdent Roland Kohler**  
**Medizintechnik GmbH & Co. KG**  
 Bodenseestraße 14-16  
 78333 Stockach, Germany  
 info@kohler-medizintechnik.de  
 www.kohler-medizintechnik.de



Visualiser la vidéo sur [www.zemfix.de](http://www.zemfix.de) ou sur Youtube.



- Les instruments sont stérilisables 135-180°C.
- **Jeter la masse thermoplastique ZemFix® utilisée après chaque utilisation. Ne pas réutiliser la masse thermoplastique!**
- Un bâtonnet ZemFix® peut-être utilisé pour env. 15-20 applications.
- Préchauffer quelques secondes les restes de bâtonnets ZemFix® et fusionner les à un nouveaux bâtonnet pour les utiliser entièrement.
- Stockage à 8-24°C (46-75°F).
- Stockage dans le réfrigérateur possible à >= 8°C/46°F.

