



Caractéristiques

- 3 modèles pour éléments unitaires et bridges
- Utilisation simple
- Tenue parfaite des prothèses
- Gain de visibilité et de précision
- Autoclavables
- Pour prothèse conventionnelle et implantaire

Description

ZemFix est un ensemble de 3 instruments ingénieux et de bâtonnets de pâte thermoplastique qui permettent la manipulation des pièces prothétiques, de l'étape de conditionnement jusqu'au scellement.

L'instrument le plus large convient aux bridges antérieurs. Un instrument est destiné aux bridges latéraux. Enfin, un instrument plus fin convient tout particulièrement aux restaurations unitaires intra et extracoronaires (inlays, onlays, coiffes, etc).

La surface des instruments présente une fine texture alvéolée pour la rétention de la pâte thermoplastique. Une fois la pâte placée selon l'étendue des pièces prothétiques, l'instrument est porté au niveau de la ou des prothèses pour les emporter. L'intrados est ainsi parfaitement visible et accessible, ce qui permet les étapes de préparation en vue du scellement.

Après l'insertion de la prothèse en bouche, une simple rotation de l'instrument permet à la prothèse de se détacher de la pâte thermoplastique sans aucun résidu. L'insertion finale s'effectue sous pression digitale ou occlusale. ZemFix offre ainsi la sécurité de ne pas faire tomber la pièce.

ZemFix permet un travail propre, ergonomique et rationnel, sans le souci majeur de contamination des surfaces ou de manque de visibilité.

Indications


- Porte-prothèse pour les traitements d'intrados
- Transfert des pièces prothétiques en bouche



Procédure



Chauffer la pâte thermoplastique.

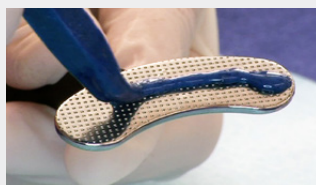

L'appliquer sur le porte-prothèse.



Saisir la prothèse sur le modèle.



Porter la prothèse garnie du ciment en bouche.

Cas clinique : Courtoisie du Dr Manuel Munoz.

Le + Bisico

ZemFix facilite tous les traitements d'intrados de pièces prothétiques en assurant une grande visibilité. La tenue parfaite des pièces prothétiques est un gage de sécurité lors des traitements mécaniques comme le sablage ou chimiques (application d'acides et d'apprêts). Fini donc, les pièces prothétiques remplies de ciment de scellement qui glissent des mains et qui tombent ! ZemFix a l'avantage majeur d'être conçu non seulement pour les éléments unitaires, mais aussi pour les bridges antérieurs et latéraux.

On aime

- Les 3 formes
- La surface microrétentive
- La visibilité assurée

Références

Réf. : KO 014 - Kit complet ZemFix

Contenu : 1 instrument ZemFix pour bridges antérieurs
1 instrument ZemFix Small pour restaurations unitaires (inlays, onlays, coiffes)
1 instrument ZemFix Wide pour bridges latéraux / écarte-joues
4 bâtonnets thermoplastiques

Réf. : KO 015 - Kit pour bridges antérieurs

Contenu : 1 instrument ZemFix pour bridges antérieurs
2 bâtonnets thermoplastiques

Réf. : KO 016 - Kit pour restaurations unitaires (Small)

Contenu : 1 instrument ZemFix Small pour restaurations unitaires (inlays, onlays, coiffes)
2 bâtonnets thermoplastiques

Réf. : KO 017 - Kit pour bridges latéraux / Ecarte-joues (Wide)

Contenu : 1 instrument ZemFix Wide pour bridges latéraux / écarte-joues
2 bâtonnets thermoplastiques

Réf. : KO 018 - Recharge bâtonnets thermoplastiques (12)


Réf. : KO 019 - Recharge bâtonnets thermoplastiques (4)

Réf. : KO 020 - Présentoir Plexiglas (16 instruments)

Produits complémentaires

- Provi Temp K
- Duo-Link Universal
- Z-Prime Plus
- Dento-Prep



Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE - Classe I -  Kohler. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis.

Non-remboursés par les organismes d'assurance santé.

Fiche Produit ZemFix (ZZ 853) - V1 - 09/2013
Ne tient pas lieu de mode d'emploi