

Préparation de la Restauration *

Céramiques vitreuses / Restaurations en céramique (à base de silice) ou disilicate / silicate de lithium



1. Appliquez PORCELAIN PRIMER dans l'intrados



2. Après essai, décontaminer l'intrados

OU

Métal, zircone, alumine, composite



1. Appliquez Z-PRIME Plus dans l'intrados



2. Après essai, décontaminer l'intrados

Préparation de la dent et scellement *

Choisir la **TECHNIQUE D'AUTOMORDANÇAGE** ou la **TECHNIQUE DE MORDANÇAGE TOTAL** décrites ci-dessous.




1. AUTOMORDANÇAGE :
Rincer abondamment au spray air / eau. Enlever l'excès d'eau (ne pas dessécher).



2. MORDANÇAGE TOTAL :
Préparer la cavité. Rincer abondamment au spray air / eau, mordancer à l'acide phosphorique et rincer abondamment. Laisser la préparation visiblement humide.

OU

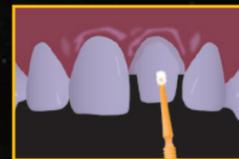

2. Appliquez ALL-BOND UNIVERSAL



3. Sécher à l'air comprimé



4. Photopolymériser 10 secondes



5. Appliquez DUO-LINK UNIVERSAL sur les surfaces de la restauration



6. Insérer la restauration



7. Optionnel : photopolymériser

* Se référer au mode d'emploi pour connaître les techniques détaillées selon indications.

INFORMATIONS DE COMMANDE :

KITS DE SCHELLEMENT ADHÉSIF UNIVERSELS

AVEC ALL-BOND UNIVERSAL BC 910

1 double-seringue DUO-LINK UNIVERSAL Teinte Universal (8 g),
1 flacon ALL-BOND UNIVERSAL (6 ml), 1 flacon Z-PRIME Plus (2 ml),
1 flacon PORCELAIN PRIMER (3 ml), accessoires, mode d'emploi

AVEC UNIVERSAL PRIMER..... sur demande

1 double-seringue DUO-LINK UNIVERSAL Teinte Universal (8 g),
2 flacons UNIVERSAL PRIMER - Parties A et B (2 x 6 ml), 1 flacon Z-PRIME Plus (2 ml),
1 flacon PORCELAIN PRIMER (3 ml), accessoires, mode d'emploi

KITS DOUBLE-SERINGUE

1 double-seringue DUO-LINK UNIVERSAL, accessoires, mode d'emploi

TEINTE UNIVERSAL BC 911

TEINTE MILKY WHITE BC 912

Pour commander : 0800 247 420 (appel gratuit) ou www.bisico.fr

Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0459 LNE/G-MED - Classe IIa. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.

Documentation Duo-Link Universal (ZZ 793) - V2 - Février 2016

 **bisico**
AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ
120 allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
BISCO
MC-3162DU

PAS DE LIMITES. PAS DE FRONTIÈRES.

DUO-LINK
UNIVERSAL™

DUO-LINK UNIVERSAL™



bisico
AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ

BISCO

DES FORCES HORS DU COMMUN !

DUO-LINK UNIVERSAL est un composite de scellement spécialement conçu pour le scellement de TOUTES* les restaurations indirectes. Il est disponible en deux teintes esthétiques : Universal (universel) et Milky White (blanc laiteux).

DUO-LINK UNIVERSAL est destiné à une utilisation avec des adhésifs conçus pour être compatibles avec tous les matériaux dentaires, parmi lesquels tous les adhésifs de BISCO.

Universel - Pour toutes les procédures de scellement*

Coiffes, bridges (prothèses fixées), inlays, onlays et tenons/pivots en métal, composite, porcelaine, céramique, zircone, alumine, restaurations CFAO, etc.

Nettoyage extrêmement facile

Formulé pour permettre une élimination rapide et facile des excès de ciment

Hautement radio-opaque

Facilement identifiable sur les clichés radiographiques pour un diagnostic rapide et efficace

Haut degré de conversion

Haut degré de conversion en mode photopolymérisable comme en mode chémozopolymérisable, pour des restaurations solides et durables

Facile d'emploi

La double-seringue automélangeuse délivre instantanément un mélange précis et homogène

Restaurations CFAO


Idéal pour toutes les restaurations réalisées au cabinet ou au laboratoire de prothèse

Nouvelles teintes

La teinte Universal présente une certaine translucidité lorsque l'épaisseur du film est faible, la teinte Milky White est plus opaque et peut s'employer pour masquer les préparations plus foncées

Résistance au cisaillement sur la Dentine (MPa)

Résistance au cisaillement mesurée sur la dentine selon la méthode Ultradent

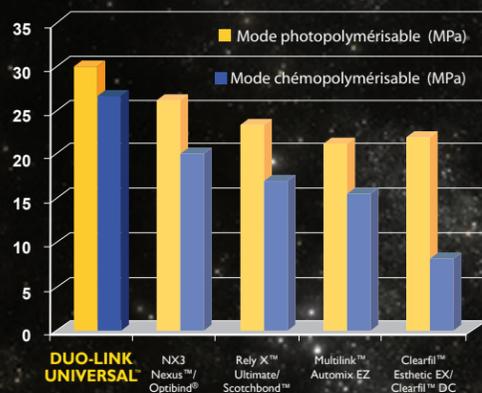

DUO-LINK UNIVERSAL surpasse les autres composites de scellement en résistance au cisaillement.

(Source : Fabricant)

Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

(Images cliniques : courtoisie du Dr. A. Notarantonio, DDS, AAACD, FICOI)




DUO-LINK UNIVERSAL placé dans l'intrados



Mise en place de la coiffe



Restauration finale

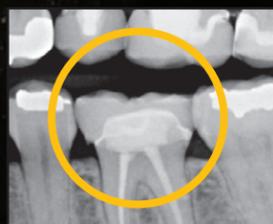

Identification aisée sur cliché radiographique

KIT DUO-LINK UNIVERSAL. . .

UNIVERSELLEMENT SIMPLE, UNIVERSELLEMENT SOLIDE



Le KIT DUO-LINK UNIVERSAL

est un système de scellement adhésif conçu pour permettre le scellement efficace de toutes vos restaurations indirectes avec des performances et une esthétique optimales. La combinaison de matériaux innovants et primés procure une forte rétention et une grande longévité des pièces prothétiques à l'aide d'un kit simple, universel et facile à utiliser.

DUO-LINK UNIVERSAL™

DUO-LINK UNIVERSAL™ est un composite de scellement spécialement conçu pour le scellement de TOUTES les restaurations indirectes et offre toutes les propriétés souhaitées pour un scellement universel : haute radio-opacité, haute résistance mécanique, force d'adhésion élevée, faible épaisseur du film et nettoyage facile des excès.

ALL-BOND UNIVERSAL®

ALL-BOND UNIVERSAL® est un adhésif VERITABLEMENT UNIVERSEL qui combine mordantage, apprêtage et collage en UN SEUL flacon.

Z-PRIME™ plus+

Z-PRIME™ Plus est un primer monocomposant utilisé pour augmenter l'adhésion entre les matériaux prothétiques et les ciments résines composites. C'est un primer polyvalent pour le traitement de surface de la zircone, de l'alumine, mais aussi des métaux/alliages, des composites et des tenons endodontiques.

PORCELAIN PRIMER

PORCELAIN PRIMER est un agent de couplage à base de silane qui améliore la liaison chimique entre les restaurations en céramique et les ciments résines composites, permettant d'optimiser la durabilité du collage à long terme.

* Pour des raisons purement esthétiques, nous recommandons l'emploi de CHOICE™ 2 pour le scellement des facettes.