

S5

Limes apicales
Sendoline[®]
PERFECT ENDO



Limes apicales S5 :

Nombre de limes :	4
Longueur des limes :	23 / 28 mm
Longueur du mandrin :	13 mm
Technique :	Standardisée
Vitesse recommandée :	300 t/min

<u>Lime</u>	<u>Conicité/ISO</u>	<u>Marquage</u>	<u>Torque (Ncm)</u>
↓ Réassort, lime 3	4/35	III	2,3
↓ Réassort, lime 3	4/40	III	2,3
↓ Réassort, lime 3	4/45	III	2,3
↓ Réassort, lime 3	4/50	III	2,3



Mode d'emploi :

1. Placer une digue en caoutchouc et préparer la cavité d'accès des canaux concernés.
2. Irriguer le canal avec une solution d'hypochlorite de sodium tout au long de la procédure et s'assurer du maintien de la perméabilité apicale.
3. Localiser les entrées canalaires à l'aide de limes manuelles ISO 10 ou 15.
4. Déterminer la longueur de travail et préparer le canal en direction apicale à l'aide de la lime de préparation n° 3 S5.
5. Si un diamètre apical plus important est requis, utiliser la lime apicale correspondante ISO 35 à 50.

En cas d'utilisation du moteur Sendoline Endo S5, le traitement sera facilement accompli en sélectionnant les modes suivants :



Lime verte	Mode n° 3
Lime noire	Mode n° 3
Lime blanche	Mode n° 3
Lime jaune	Mode n° 3



Sendoline
SMITH

Box 7037, S-187 11 Täby, Sweden

Tel: + 46 8 445 88 30

Fax: + 46 8 445 88 33

info@sendoline.com

www.sendoline.com



0413