

Ciment de scellement provisoire sans eugéno! pour couronnes & bridges

Provi Bond K est un **ciment de scellement provisoire sans eugéno!**, en cartouches et mini-seringues, indiqué pour le scellement des couronnes et bridges provisoires et pour le scellement d'essai des restaurations définitives. Il montre une excellente adhérence aux matériaux pour couronnes et bridges provisoires, mais peut être facilement déposé des surfaces dentaires des préparations. Disponible en cartouches et mini-seringues, l'utilisation du **Provi Bond K** est très simple, conviviale et économique. Grâce à sa formulation sans eugéno!, il n'interfère pas avec la polymérisation des matériaux d'obturation et des ciments de scellement définitifs à base de résine. Ce ciment de scellement provisoire est à base d'oxyde de zinc et d'acides organiques. L'utilisation de ce ciment sans eugéno! est fortement recommandée, tout particulièrement en cas d'allergie à l'eugéno!.

Provi Bond K répond aux exigences des normes DIN EN ISO 3107 et aux spécifications ADA/ANSI N° 30.

APPLICATION

Aucun pistolet n'est requis pour l'utilisation de la mini-seringue de 8,5 g.

Utilisation de la cartouche à l'aide du pistolet

Retirer le capuchon et le jeter (ne pas le réutiliser). Fixer la buse d'automélange sur la cartouche ou la mini-seringue, en la verrouillant par une rotation d'un quart de tour vers la droite. Le matériau est maintenant prêt pour l'application. Laisser la buse d'automélange en place après utilisation; elle servira de capuchon jusqu'à l'utilisation suivante.

Note :

Éliminer les 2-3 premiers mm du mélange (d'environ la taille d'un petit pois). Le mélange exprimé ensuite sera alors parfait. Répéter ces opérations à chaque changement de buse d'automélange.

Scellement

Provi Bond K peut être directement appliqué sur l'intrados de la couronne ou du bridge provisoire, par une pression légère, à partir de la buse d'automélange.

Appliquer une fine couche de ciment dans l'intrados et insérer la couronne ou le bridge provisoire sur les préparations dans les **1 :30 minutes** qui suivent (temps de travail), prudemment mais fermement.

Note :

Ne pas sécher les préparations, mais plutôt les réhydrater avec de l'eau. Un milieu dentaire humide (piliers hydratés) facilitera encore la dépose ultérieure de la couronne ou du bridge provisoire.

Provi Bond K durcit en bouche en **2-3 minutes**. Après la prise, éliminer les excès de **Provi Bond K**.

Précautions

- Ne pas utiliser **Provi Bond K** en cas d'allergie connue à l'un de ses composants.

- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Conservation

Conserver à une température de 8 à 25°C (47 - 78°F). Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Garantie

Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de fabrication. L'utilisateur est responsable de la détermination et du bon choix de ce produit pour son application. En cas de défectuosité avérée dans le cadre de la garantie, la responsabilité de Bisico se limite au remplacement du produit.

Limitation de Responsabilité

Sauf en cas d'interdiction par la loi, Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG ne pourra être tenu responsable de toute perte ou dommage découlant de ce produit, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs, quel que soit le motif évoqué, y compris une garantie, un contrat, une négligence ou la responsabilité stricte.

Conditionnement

Art.-N° 03710 Provi Bond K

1 mini-seringue de 8,5 g / 5 ml, 10 buses d'automélange marrons 1:1

Art.-N° 03720 Provi Bond K

1 cartouche de 45 g / 25 ml, 10 buses d'automélange bleues 1:1

Exclusivement réservé à l'usage dentaire !