



CE0459

INTC-020R2

Rev. 6/13

BisCover_x LV

FICHE TECHNIQUE



BISCO, Inc. • 1100 W. Irving Park Rd. • Schaumburg, IL 60193 • U.S.A. • ☎ 847-534-6000 • www.bisco.com



BISICO France • 120 allée de la Coudoulette • 13680 Lançon de Provence • France • ☎ 33-4-90-42-92-92



Consulter les
instructions
d'utilisation

Fiche Technique BisCover LV (ZZ 1203) - V1 - 09/2014
Ne tient pas lieu de mode d'emploi

BisCoverTM LV

Liquide de polissage
de faible viscosité

TECHNIQUE D'APPLICATION SUR COMPOSITES POLYMÉRISÉS



Mordancer pendant
15 secondes.



Rincer abondamment.



Sécher soigneusement
à l'air comprimé.



Appliquer
BISCOVER LV (en
une fine couche).



Attendre 15 secondes pour per-
mettre l'évaporation du solvant.
Ne pas étaler à l'air comprimé.



Photopolymériser 30 secondes à
l'aide d'une lampe LED ou
halogène.*



Consulter les
instructions
d'utilisation

*Consulter les instructions d'utilisation pour les temps de photopolymérisation à l'aide d'autres lampes.