

FR Température de stockage recommandée

FR Légende

INGREDIENTS

White Dental Beauty 5% CP with NOVON®

Ingredients: Water (Aqua), Glycerine, Carbomer (Sodium salt), Hydrogen Peroxide, Sodium Tripolyphosphate, Urea, Aroma, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride.

White Dental Beauty 10% CP with NOVON®

Ingredients: Water (Aqua), Glycerine, Carbomer (Sodium salt), Hydrogen Peroxide, Sodium Tripolyphosphate, Urea, Aroma, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride.

White Dental Beauty 16% CP with NOVON®

Ingredients: Water (Aqua), Glycerine, Carbomer (Sodium salt), Hydrogen Peroxide, Sodium Tripolyphosphate, Urea, Aroma, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride.

White Dental Beauty 6% HP with NOVON®

Ingredients: Water (Aqua), Glycerine, Carbomer (Sodium salt), Hydrogen Peroxide, Sodium Tripolyphosphate, Urea, Aroma, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride.



Patient
Mode d'emploi

FR Système de blanchiment dentaire



International Development Centre, Valley Drive, Ilkley, West Yorkshire, LS29 8AL

Tel: +44 (0)1943 605050

S1 REV: 01/2016



FR-1 INSTRUCTIONS POUR LE PATIENT

Placer le gel à l'intérieur de la gouttière personnalisée selon les instructions de votre chirurgien-dentiste.




Se brosser les dents, puis insérer la gouttière. Adapter doucement les bords de la gouttière contre les dents. La gouttière peut être portée 6 à 10 heures durant la nuit ou 1 à 6 heures en journée.



Éliminer les excès de gel à l'aide d'une brosse à dents souple ou de doigts propres. Se rincer la bouche deux fois. Ne pas avaler l'eau de rinçage.



En cas d'apparition de sensibilités significatives, arrêter le traitement et consulter votre chirurgien-dentiste.

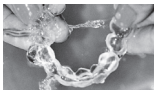

FR-2

Nettoyer la gouttière à l'aide d'une brosse à dents souple sous l'eau froide.



Blanchiment des dents dépolées:

Irriguer l'intérieur de la dent selon les instructions de votre chirurgien-dentiste. Placer le gel à l'intérieur de la dent, ainsi qu'à l'intérieur de la gouttière.

Précautions relatives au blanchiment:

- Le traitement de blanchiment est contre-indiqué en cas de grossesse.
- Conserver le gel à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Ne pas congeler.
- Les couronnes et les restaurations ne répondent pas aux traitements de blanchiment.
- Les aliments et boissons acides peuvent provoquer des sensibilités.
- Pour toute question relative à l'utilisation appropriée du produit, consulter votre chirurgien-dentiste dans les plus brefs délais.
- Ne pas fumer ni manger pendant le traitement de blanchiment.

Précautions générales:

FR-3

- Les dents sont naturellement plus foncées près de la gencive. L'éclaircissement de ces zones peut nécessiter plus de temps que les autres surfaces de la dent ; ces zones restent généralement légèrement plus foncées après le traitement.
- Un faible pourcentage de patients éprouve des hypersensibilités lors du traitement de blanchiment. Dans ce cas, retirer la gouttière et contacter votre chirurgien-dentiste.
- Les aliments ou boissons riches en acide citrique peuvent provoquer des sensibilités.
- Certains patients ont signalé une gêne temporaire au niveau des gencives, des lèvres, de la gorge ou de la langue. Si l'un de ces symptômes persiste plus de deux jours ou s'empire progressivement, contacter votre chirurgien-dentiste. Ces effets secondaires s'atténuent normalement en 1 à 3 jours suivant l'interruption du traitement.
- Le café, le tabac et d'autres produits peuvent recolorer vos dents avec le temps. Le cas échéant, il est possible de reprendre un traitement de quelques nuits.
- Les contrôles ainsi que les mesures régulières d'hygiène bucco-dentaire et de prophylaxie sont importants pour conserver un beau sourire.
- Pour toute question relative au traitement de blanchiment, contacter votre chirurgien-dentiste.
- Certaines obturations anciennes à l'amalgame ou en « argent » peuvent laisser une couleur pourpre foncée dans la gouttière de blanchiment. Ceci est normal.
- Conserver le gel de blanchiment à l'abri du soleil et de la chaleur.
- Jeter tout gel de blanchiment inutilisé en fin de traitement.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas avaler le gel ou l'eau de rinçage. Le produit contient du peroxyde et peut contenir du fluorure ; leur absorption à fortes doses peut être nocive.



AVERTISSEMENT

H320 - PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX
H315 - PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE

FR-4

Précautions pour l'Europe

- Ne pas utiliser sur une personne de moins de 18 ans.
- À vendre uniquement aux dentistes. À chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée par un dentiste ou sous sa surveillance directe en cas de niveau de sécurité équivalent. À fournir ensuite au consommateur pour conclure le cycle d'utilisation.
- Veuillez noter la date d'expiration indiquée sur l'emballage/la seringue.
- Éviter tout contact avec les yeux. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux.