

## **MODE D'EMPLOI PROFESSIONAL WHITENING STRIPS**

### **Gamme professionnelle** Strips d'éclaircissement dentaire premium

Formulation premium puissante à libération lente des agents d'éclaircissement pour un résultat plus efficace.

- ✓ 14 applications (28 strips)
- ✓ sûrs pour l'émail
- ✓ technologie adhérente
- ✓ formulation premium puissante

### **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Les Professional Whitening Strips WhiteWash sont des strips souples contenant la quantité optimale de gel pour un traitement d'éclaircissement simple, sûr et efficace de vos dents. Leur formulation premium puissante contient des agents d'éclaircissement à libération lente pour un résultat plus efficace. Ces strips d'éclaircissement professionnels sont sûrs pour l'émail et sont conçus pour épouser les contours de vos dents ; ils vous permettent de réaliser un éclaircissement dentaire en toute sécurité et confort, en les appliquant 60 minutes, une fois par jour, pendant 14 jours.

### **DURÉE RECOMMANDÉE D'UN CYCLE DE TRAITEMENT**

Appliquer au moins 60 minutes, une fois par jour, pendant 14 jours, ou jusqu'à l'obtention du résultat désiré. Pour un meilleur résultat, prolonger jusqu'à 2 heures le temps de traitement.

### **INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION :**

Lire et suivre les instructions et utiliser le produit selon celles-ci.

Un examen bucco-dentaire est recommandé préalablement à tout traitement d'éclaircissement.

Ne pas utiliser chez les Patients de moins de 18 ans. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement ou chez des Patients consommateurs réguliers de tabac ou d'alcool. Ne pas utiliser en cas de sensibilité ou d'allergie connue au peroxyde d'hydrogène ou à tout autre ingrédient entrant dans la composition du produit. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Ne pas utiliser le produit dans les 2 semaines précédant, ou immédiatement après une restauration dentaire.

Éviter de manger, boire, fumer ou dormir durant l'application des strips d'éclaircissement. Ne pas avaler les strips d'éclaircissement.

Arrêter immédiatement le traitement en cas d'apparition de sensibilité ou d'irritation gingivale, douleurs dentaires, restaurations défectueuses, gingivite, nausées, etc.

Éviter tout contact avec les yeux ; rincer immédiatement et abondamment en cas de contact oculaire accidentel. Éviter tout contact avec la peau ; le contact cutané du gel peut entraîner une irritation temporaire et/ou une décoloration. Se laver soigneusement les mains à l'eau savonneuse après application des strips d'éclaircissement. Éviter tout contact avec les vêtements ou tissus.

Vente exclusivement réservée aux Praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle de traitement, la première application doit être réalisée uniquement par un Praticien de l'art dentaire ou sous sa supervision directe si un niveau équivalent de sécurité peut être assuré. Le produit peut ensuite être remis au Patient afin de réaliser le cycle de traitement complet.

Les Professional Whitening Strips WhiteWash n'agissent que sur les dents naturelles ; ils n'éclaircissent pas la teinte des coiffes, des facettes, des matériaux de restauration cavitaires ou des prothèses adjoindes.

Les Professional Whitening Strips WhiteWash ne remplacent pas un rendez-vous régulier auprès d'un Chirurgien-Dentiste.

Contient du peroxyde d'hydrogène (6 %).

Conserver dans un endroit frais et sec.

Tenir hors de la portée des enfants.

## INGRÉDIENTS

PVP, PEG-400, gomme de cellulose, hydroxypropylcellulose, glycérine, peroxyde d'hydrogène (6 %), huile essentielle de mentha viridis (menthe verte), pyrophosphate tétrasodique, eau, diméthiconol.

Se référer à l'emballage externe pour le numéro de lot et la date de péremption.

Utiliser en combinaison avec les autres produits de la gamme d'éclaircissement WhiteWash incluant des dentifrices et des brosses à dents pour contribuer au maintien d'un sourire éclatant plus longtemps.

Développés et formulés par des Chirugiens-Dentistes du Royaume-Uni et spécialement fabriqués en Corée du Sud pour WhiteWash Laboratories.

### DISTRIBUÉ PAR :

**Royaume-Uni (Europe)** : WHITEWASH LABORATORIES, PO BOX 960, TS 19 1PW, ROYAUME-UNI

**Australie** : OZDENT, UNIT 12, 6 GLADSTONE ROAD, CASTLE HILL, SYDNEY, NSW, 2158, AUSTRALIE

### DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :

#### BISICO FRANCE

120 allée de la Coudoulette  
13680 LANCON DE PROVENCE

Tel : 04 90 42 92 92

[Svce.commercial@bisico.fr](mailto:Svce.commercial@bisico.fr)

[www.bisico.fr](http://www.bisico.fr)




# PROFESSIONAL WHITENING STRIPS

## NOTICE D'INFORMATION DESTINÉE AUX PATIENTS

### INSTRUCTIONS

1. Ouvrir le blister et sortir les strips. Détacher les strips de leur film protecteur. Chaque blister contient 2 strips, l'un pour les dents supérieures, l'autre pour les dents inférieures.
2. Appliquer la face adhésive du strip d'éclaircissement sur les dents. Aligner le strip sur le bord de vos gencives et le faire doucement épouser la forme de vos dents. Le strip peut être replié derrière les dents pour faciliter son maintien au besoin. Appliquer le strip du haut sur les dents supérieures et le strip du bas sur les dents inférieures.
3. Retirer délicatement chaque strip après 60 minutes d'application et veiller à les jeter en toute sécurité. Pour un meilleur résultat, prolonger jusqu'à 2 heures le temps de traitement.

#### 1) Détacher

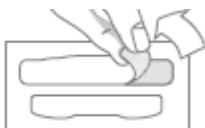

#### 2) Appliquer



#### 3) Retirer



### ENTREtenir L'ÉCLAT DE VOTRE SOURIRE

Comme pour tous les traitements d'éclaircissement, il vous sera nécessaire de le renouveler pour entretenir l'éclat de votre sourire. Le traitement d'éclaircissement à l'aide des Professional Whitening Strips Whitewash peut être renouvelé tous les 12 mois. En alternative, vous pouvez utiliser 1 à 2 strips chaque mois pour conserver au mieux l'éclat de vos dents.

Utiliser en combinaison avec les autres produits de la gamme d'éclaircissement WhiteWash pour contribuer au maintien de l'éclat de votre sourire.

### QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

**Q : Quel est le principe actif des strips d'éclaircissement et est-il sûr ?**

R : Le principe actif est du peroxyde d'hydrogène à 6 % qui est utilisé en toute sécurité par les Chirugiens-Dentistes dans le monde entier pour l'éclaircissement dentaire.

**Q : Les strips peuvent-ils abîmer mes restaurations dentaires ?**

R : Les strips d'éclaircissement n'agissent QUE sur les dents naturelles ; ils n'éclaircissent pas la teinte des coiffes, des facettes, des bridges, des matériaux de restauration cavitaires ou des prothèses adjointes. Il ne faut pas les utiliser sur les dents mobiles, sur les restaurations provisoires ou en présence d'appareillages orthodontiques. Consultez votre Chirurgien-Dentiste pour toute question au sujet de vos dents.

**Q : Quand verrai-je le résultat ?**

R : Le résultat s'observe généralement après 4 à 6 applications, mais certains Patients remarquent une différence avant. Pour un meilleur résultat, poursuivez le cycle de traitement dans son intégralité.

**Q : Les strips d'éclaircissement peuvent-ils rentrer en contact avec mes gencives ?**

R : Oui, mais il faut limiter ce contact pour éviter toute irritation gingivale.

**Q : Dois-je me brosser les dents avant / après utilisation des strips ?**

R : Vos dents doivent être propres avant la mise en place des strips d'éclaircissement ; il convient toutefois de ne pas les appliquer immédiatement après le brossage. Suivant la séance d'éclaircissement, rincez-vous la bouche à l'eau et utilisez un mouchoir en papier pour éliminer tout gel résiduel. Attendez au moins 30 minutes avant de vous brosser les dents.

**Q : Des taches blanches apparaissent parfois sur mes dents après la séance d'éclaircissement. Dois-je m'en inquiéter ?**

R : Non, ces taches blanches sont temporaires. Elles sont sans danger et disparaîtront au bout de 24 heures.

**Q : Puis-je avaler ma salive lors du port des strips d'éclaircissement ?**

R : Oui, vous pouvez. Avaler sa salive pendant le port des strips d'éclaircissement est absolument sans danger. Vous pouvez également noter une formation de mousse lorsque le gel commence son action, cela est normal.

**Q : Que faire en cas de sensibilité dentaire ou d'irritation gingivale ?**

R : L'apparition d'une sensibilité dentaire et / ou d'une irritation gingivale lors des procédures d'éclaircissement n'est pas rare. Cela est temporaire et SANS danger. Pour atténuer ces symptômes, réduisez la fréquence des traitements ou cessez le traitement jusqu'à disparition de la sensibilité / de l'irritation. Si les symptômes persistent, arrêtez le traitement et consultez votre Chirurgien-Dentiste.