
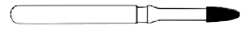


**CS2LV (MC 506) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE POUR RESTAURATIONS POSTERIEURES DIRECTES ET INDIRECTES EN COMPOSITE**

**PREPARATION**

- Fraises Conique à angle interne arrondi 845R-012 ML et 846R-014 ML (dents courtes), 847R-014 ML et 847R-021 ML (dents longues) pour les préparations cavitaires.
- Fraises Conique à angle interne arrondi bague rouge 845R-012 F et 846R-014 F (dents courtes), 847R-014 F et 847R-021 F (dents longues) pour les finitions cavitaires.
- Fraises Flamme 859-012 ML pour les préparations interproximales et bague rouge 859-012 F pour les finitions interproximales.
- Fraises Olive 368-025 ML pour les préparations occlusales et bague rouge 368-025 F pour les finitions occlusales.
- Fraises Tonneau 811-037 ML pour les réductions occlusales et bague rouge 811-037 F pour les finitions occlusales.
- Fraises Boule carbure de tungstène 014 et 018 pour l'élimination de la dentine pathologique.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

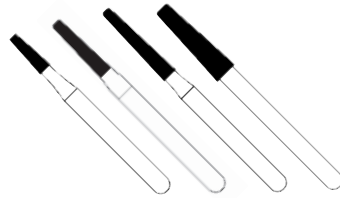

**FINITION DES COMPOSITES**

- Fraise Flamme bague rouge 853-008 F pour la finition occlusale interproximale.
- Fraise Olive bague rouge 390-014 F pour la finition occlusale.

**POLISSAGE**

- Pointe montée en silicone diamanté blanche SHINY 14 pour le prépolissage.
- Brossette SHINY S pour le polissage, à imprégner au préalable de la pâte diamantée SHINY A de 3 µM, puis SHINY B de 1 µM.
- Roue en feutre SHINY F pour le lustrage de la restauration, à utiliser avec la pâte SHINY C en oxyde d'alumine.



**MICERIUM S.p.A.**  
Via G. Marconi, 83  
16030 Avegno (GE) - Italy  
Tel. +39 0185 7887 880  
Fax +39 0185 7887 970  
email:hfo@micerium.it



**Distribué par : Bisico France**  
120 Allée de la Coucoulette  
F-13680 Lançon de Provence  
Tél : +33 (0)4 90 42 92 92  
Fax : +33 (0)4 90 42 92 61  
www.bisico.fr

**CS1LV (MC 312) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE POUR COMPOSITES ANTERIEURS DIRECTS**


**PREPARATION**

- Fraises Boule 801-012 ML (pour émail fin) et 801-014 ML (pour émail plus épais) pour la préparation du chanfrein vestibulaire.
- Fraises Boule bague rouge 801-012 F (pour émail fin) et 801-014 F (pour émail plus épais) pour la finition de la préparation du chanfrein vestibulaire.
- Fraise Cylindrique lisse à bout travaillant 839-014 ML pour l'épaulement à 90° au niveau interproximal et palatin/lingual.
- Fraise Cylindrique lisse à bout travaillant bague rouge 839-014 F pour la finition de l'épaulement à 90° au niveau interproximal et palatin/lingual.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.



**FINITION DES COMPOSITES**

- Fraise Flamme 861-012 ML pour les corrections grossières.
- Fraise Flamme bague rouge 861-012 F pour les corrections vestibulaires.
- Fraise Olive bague rouge 368-025 F pour les corrections palatines.
- Fraise Flamme bague rouge 853-008 F pour les corrections vestibulaires et incisales.
- Pointe montée en carbure de silicium verte SHINY 21 ou Fraise Flamme 30 lames carbure de tungstène pour les corrections fines.

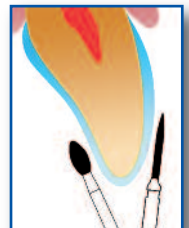

**TRAITEMENT DES SURFACES ET POLISSAGE**



- Fraise Flamme bague rouge 853-008 F pour la macrogéographie (verticale).
- Pointe montée en silicone diamanté blanche SHINY 14 pour le prépolissage.
- Pointe montée en carbure de silicium verte SHINY 21 pour la macrogéographie (horizontale).
- Brossette SHINY S pour le polissage, à imprégner au préalable de la pâte diamantée SHINY A de 3 µM, puis SHINY B de 1 µM.
- Roue en feutre SHINY F pour le lustrage de la restauration, à utiliser avec la pâte SHINY C en oxyde d'alumine.



## CS3LV (MC 507) KIT DE PREPARATION, DE FINITION ET DE POLISSAGE POUR FACETTES EN COMPOSITE ET EN CERAMIQUE ET POUR COIFFES SANS INTRASTRUCTURE METALLIQUE



### PREPARATION POUR COIFFE

- Fraises Conique à angle interne arrondi 847R-016 ML (dents courtes) et Congé large 850-016 ML (dents longues) pour les préparations de moignons. Fraises Conique à angle interne arrondi bague rouge 847R-016 F et Congé large 850-016 F pour la finition des préparations de moignons.
- Fraises Olive 368-025 ML pour la préparation des faces palatines et bague rouge 368-025 F pour la finition des préparations.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

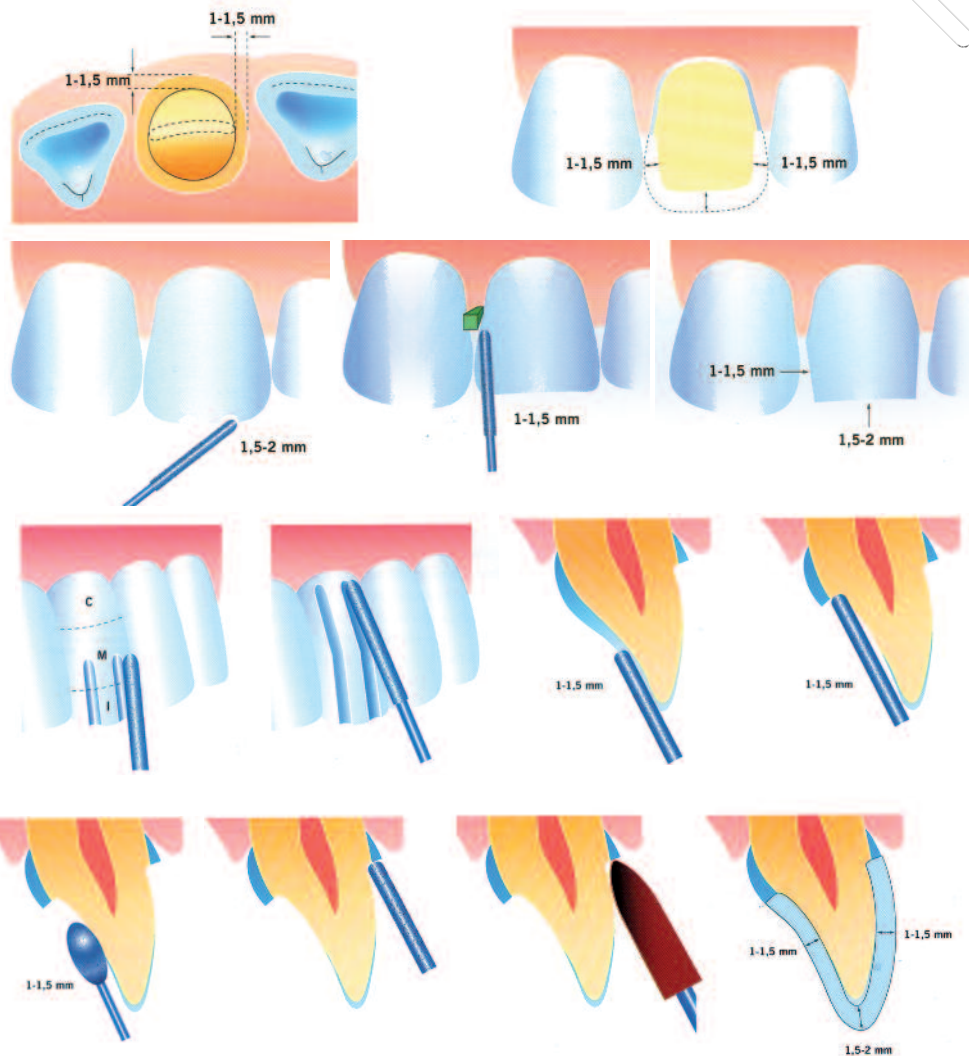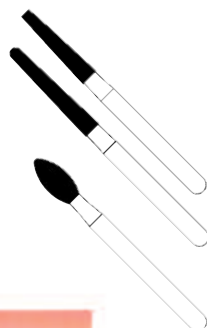

### PREPARATION POUR FACETTE

- Fraises Boule 801-012 ML (pour émail fin) et 801-016 ML (pour émail plus épais) pour la préparation du chanfrein de la facette au niveau proximal. Fraises Boule bague rouge 801-012 F (pour émail fin) et 801-016 F (pour émail plus épais) pour la finition de la préparation du chanfrein.
- Fraises Conique à angle interne arrondi 847R-016 ML et Conique à bout plat 848-012 ML pour le sulcus vestibulaire en suivant les profils d'émergence incisale et les différentes inclinaisons. Fraises Conique à angle interne arrondi bague rouge 847R-016 F et Conique à bout plat 848-012 F pour la finition des préparations.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

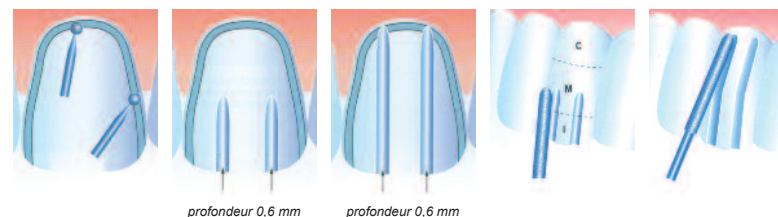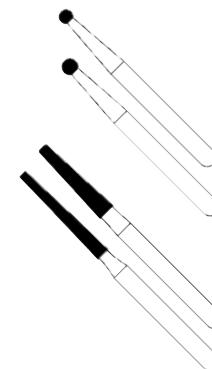

## CS4LV (MC 508) KIT DE PREPARATION ET DE FINITION A 50-90° POUR COIFFES METALLIQUES

### PREPARATION

- Fraises Cylindrique à bout pointu 878-012 ML et 878-016 ML (dents courtes), 879-012 ML et 879-016 ML (dents longues) pour les préparations coronaires de couronnes céramo-métalliques à 50°. Fraises Cylindrique à bout pointu bague rouge 878-012 F et 878-016 F (dents courtes), 879-012 F et 879-016 F (dents longues) pour la finition des préparations.
- Fraises Congé large 850-018 ML, Conique à bout plat 847-016 ML et 848-018 ML pour les préparations coronaires à 90°. Fraises Congé large bague rouge 850-018 F, Conique à bout plat 847-016 F et 848-018 F pour la finition des préparations.
- Fraises Tonneau 811-037 ML pour les préparations occlusales et bague rouge 811-037 F pour les finitions occlusales.
- Fraise Cylindrique lisse à bout travaillant 839-016 ML pour la limite proximale à épaulement à 90° et la préparation linguale/palatine. Fraise Cylindrique lisse à bout travaillant bague rouge 839-016 F pour la finition des préparations.
- Pointe montée en silicone marron SHINY 33 pour le polissage de la préparation.

