



Mode d'emploi

Ajustement/Polissage intra-oral de la zircone et du disilicate de lithium

1 Avant utilisation


Faire un contrôle visuel du polissoir pour s'assurer de l'absence de fissures, d'ébréchures et de corrosion. Veiller à ce que le polissoir reste bien en place sur la fraise. NE PAS utiliser si l'instrument est endommagé ou usé.

2 Stérilisation

Les instruments sont livrés non stériles. Les instructions de stérilisation et de nettoyage complètes sont consultables sur : www.garrisondental.com/sterilization. Passer les instruments à l'autoclave à 134 °C pendant cinq (5) minutes avec un temps de séchage de dix (10) minutes. Il relève de la responsabilité du dentiste ou du praticien autorisé de veiller à une stérilisation efficace.

3 Rangement

Laisser les instruments à polir dans la cassette de stérilisation jusqu'à leur utilisation. Les instruments doivent être rangés dans un endroit sec et propre à température ambiante.

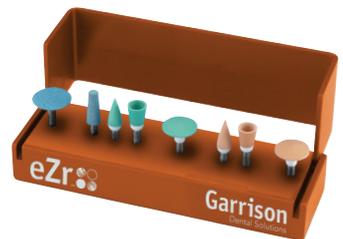

4 Précautions

- A. L'instrument doit être utilisé par un dentiste ou un praticien autorisé.
- B. Porter des gants pour manipuler les instruments.
- C. Les pièces à main doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.
- D. Veiller à ce que l'instrument à polir soit solidement fixé sur son support.
- E. Porter des lunettes de protection contre les projections de particules.
- F. Porter un masque chirurgical pour éviter d'inhaler des particules.

5 Utilisation

- A. Maintenir un mouvement constant pour éviter un échauffement localisé et un dommage potentiel.
- B. La plage de vitesses d'utilisation est 7 000 à 10 000 tr/min. NE PAS aller au-delà de 20 000 tr/min.
- C. Éviter d'appliquer une pression ou un effet de levier excessif(ve).
- D. Les meilleurs résultats sont obtenus en commençant avec les instruments à polir à gros grain et en finissant par ceux à grain fin.

6 Post-utilisation

Les fraises utilisées doivent être considérées contaminées et requièrent les précautions de manipulation appropriées pour le retraitement consécutif.

Les instructions mises à jour pour le nettoyage et la stérilisation, notamment, sont consultables sur : www.garrisondental.com/sterilization