

Recommandations d'entretien

Les Instruments American Eagle (AEI) de Technologie XP™ sont conçus et fabriqués pour une utilisation répétée sans nécessité d'affûtage. Ils gardent leur forme et design d'origine tout au long de leur durée de vie. Bien que les instruments XP puissent être nettoyés et stérilisés comme les instruments conventionnels en acier inoxydable, le respect des recommandations ci-dessous permettra une longévité accrue et améliorera encore les performances de vos instruments de Technologie XP™.



Technique

- **Prendre** soin de ces instruments car ils bénéficient de lames plus fines et plus tranchantes
- **Eliminer** le tartre en douceur en 4-6 passages
- **Eviter** leur utilisation sur les limites, les débordements, les amalgames ou les composites
- **Eviter** de fracturer le tartre



Entretien

- **Utiliser** des cassettes pour le nettoyage et le stockage
- **Tester** de manière périodique l'affûtage des instruments avec une barre de test d'affûtage (réf. AE 579)



Nettoyage

- **Placer** rapidement les instruments dans le bac à ultrasons
* Le cycle de nettoyage standard recommandé est de 20 minutes
- **Utiliser** des agents de nettoyage neutres
- **Toujours rincer** à l'eau déminéralisée après le nettoyage ultrasonique
- **Eviter** l'utilisation de solutions à base de chlore, chlorures, chlorure de sodium et fluorures



Stérilisation

- **Sécher** les instruments avant la stérilisation
- **Utiliser** un autoclave et suivre les recommandations du fabricant
- **Laisser** le cycle de séchage s'achever complètement

Stockage

- **Sécher** totalement les instruments avant stockage



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC
better DENTISTRY by DESIGN™

6575 Butler Creek Rd. Missoula, MT 59808 USA | 406-549-7451 | www.ameagle.com

Notre distributeur en France : BISICO France • 120, Allée de la Coudoulette • 13680 Lançon de Provence
Tél. : +33 (0)4 90 42 92 92 • Fax : +33 (0)4 90 42 92 61 • www.bisico.fr