

# COMMENT UTILISER CORRECTEMENT LA TECHNOLOGIE XP™

## TENIR L'INSTRUMENT

Tenir à peine l'instrument et l'utiliser selon un mouvement léger pour un détartrage exploratif.

Couper le tartre par petits coups ;  
ne pas fracturer le tartre.

## AVANTAGES

- + Les touches légères aident à la protection ergonomique des mains et minimisent les risques d'apparition de pathologies au niveau de la main et du poignet
- + Les touches légères augmentent la longévité de l'instrument
- + Lames toujours affûtées, moins susceptibles de brunir le tartre
- + Gain de temps
- + Améliore le confort des Patients
- + Décroit le bruit de détartrage pour un confort auditif supérieur
- + Nécessite moins de pression latérale pour l'efficacité du détartrage

## RECOMMANDATIONS

- + Les instruments XP sont conçus pour le détartrage fin sous-gingival et pour le surfacage radiculaire. Eviter de les utiliser au niveau des limites et des débordements.
- + Vous n'avez pas à modifier votre façon de détartrer ou surfacier les racines ; il faut seulement tenir plus délicatement l'instrument et exercer moins de force.
- + Du fait du design plus fin de leur lame, nous ne recommandons pas d'affûter les instruments XP.
- + Avec une utilisation et une maintenance appropriées, vous pouvez vous attendre à une longévité des instruments XP similaire à celle des instruments en acier inoxydable, **sans nécessité d'affûtage**.



**AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC**

**better DENTISTRY by DESIGN™**

6575 Butler Creek Rd. Missoula, MT 59808 USA | 406-549-7451 | [www.am-eagle.com](http://www.am-eagle.com)

Notre distributeur en France : **BISICO France** • 120, Allée de la Coudoulette • 13680 Lançon de Provence  
Tél. : +33 (0)4 90 42 92 92 • Fax : +33 (0)4 90 42 92 61 • [www.bisico.fr](http://www.bisico.fr)