

Fabriqués à partir d'un alliage titane de qualité médicale, nos instruments de maintenance implantaire sont conçus pour ne pas rayer ou endommager les piliers implantaires en titane et sont fabriqués à 100 % aux États-Unis. Les Instruments American Eagle (AEI) d'un design unique comprennent des détartreurs avec des extrémités arrondies, ce qui permet un accès sous-gingival sécurisé. Bien que ces instruments puissent être nettoyés et stérilisés comme les instruments conventionnels en acier inoxydable, le respect des recommandations ci-dessous permettra une longévité accrue de vos instruments de maintenance implantaire. Toujours suivre les recommandations du fabricant d'implants pour la maintenance implantaire.



Technique

- **Commencer** par l'exploration des zones d'un mouvement léger, afin de détecter la présence de tartre et déloger le biofilm
- **Éliminer** le tartre en douceur
- **Utiliser** les instruments uniquement sur les surfaces de l'implant
- **Éviter** leur utilisation sur les limites, l'amalgame, les ciments, les débordements et les composites



Entretien

- **Utiliser** des cassettes pour le nettoyage et le stockage
- **Tester** de manière périodique l'affûtage des instruments avec une barre de test d'affûtage (réf. AE 579)
- **Utiliser** une pierre diamantée (réf. AE 580) pour l'affûtage de vos instruments de maintenance implantaire
- **Éviter** l'utilisation de pierres d'affûtage trop rugueuses ou à gros grain



Nettoyage

- **Placer** rapidement les instruments dans le bac à ultrasons
* Le cycle de nettoyage standard recommandé est de 20 minutes
- **Utiliser** des agents de nettoyage neutres
- **Toujours rincer** à l'eau déminéralisée après le nettoyage ultrasonique



Stérilisation

- **Sécher** les instruments avant la stérilisation
- **Utiliser** un autoclave et suivre les recommandations du fabricant
- **Laisser** le cycle de séchage s'achever complètement

Stockage

- **Sécher** totalement les instruments avant stockage



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

better DENTISTRY by DESIGN™

6575 Butler Creek Rd. Missoula, MT 59808 USA | 406-549-7451 | www.ameagle.com

Notre distributeur en France : **BISICO France** • 120, Allée de la Coudoulette • 13680 Lançon de Provence
Tél. : +33 (0)4 90 42 92 92 • Fax : +33 (0)4 90 42 92 61 • www.bisico.fr