



ASPIJECT®


Seringue auto-aspirante pour
infiltration et anesthésie tronculaire

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI


1.

Visser une aiguille à usage dentaire standard sur la seringue.

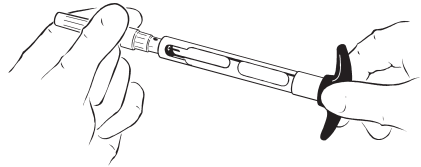


2.

Pour éviter une perforation mal alignée (non centrée) de la membrane de caoutchouc de la cartouche (ce qui pourrait causer une fuite de la cartouche pendant l'injection), insérer d'abord la partie arrière de la cartouche.

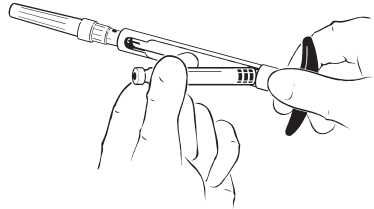

3.

Pousser la cartouche vers l'avant dans la seringue de manière à ce que l'aiguille perce la membrane de caoutchouc – s'assurer que l'aiguille pénètre bien au centre de la membrane.

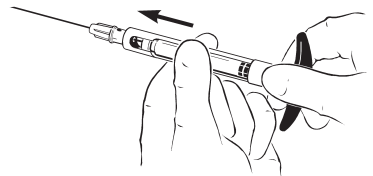


4.

Une aspiration « passive » est obtenue en appuyant brièvement sur le piston, ce qui entraîne une déformation temporaire de la membrane de caoutchouc de la cartouche par le petit collet à la base de la seringue.


L'aspiration a lieu lorsque la membrane de caoutchouc de la cartouche reprend sa forme initiale, créant ainsi une légère dépression dans la cartouche.

(La fonction d'aspiration dépend de l'élasticité de la membrane de caoutchouc, c'est pourquoi toutes les cartouches ne conviennent pas pour une aspiration « passive ».)

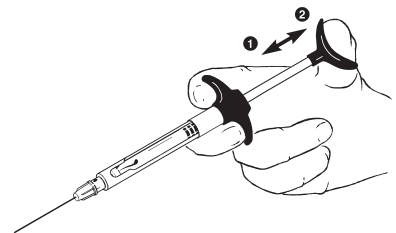

5.

Après l'injection, pousser la cartouche utilisée vers l'arrière dans la seringue. Elle peut ensuite être retirée soit en tournant la seringue partie ouverte vers le bas, soit en soulevant la cartouche avec le doigt pour la retirer de la seringue.

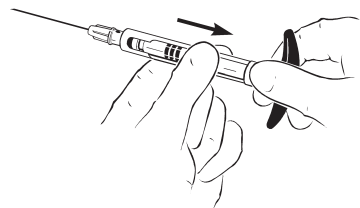

ENTRETIEN DE LA SERINGUE

La seringue ASPIJECT® est fabriquée à partir d'un acier inoxydable haut de gamme et d'une matière thermoplastique d'ingénierie résistant spécialement à la chaleur et aux produits chimiques. La seringue peut être stérilisée par n'importe quelle méthode, puisqu'elle supporte des températures allant jusqu'à 200°C.

Comme tous les instruments en acier inoxydable, la seringue ASPIJECT® doit être soigneusement nettoyée et rincée avant stérilisation. La plupart des solutions anesthésiques ont un PH acide et si les traces ne sont pas éliminées avant la stérilisation, il peut se produire des décolorations à la surface de l'acier.

GARANTIE

La seringue ASPIJECT® est garantie contre les vices de fabrication pendant 5 ans.

La garantie ne couvre pas des dommages dus à un entretien insuffisant ou à un maniement incorrect.

FABRICANT

RØNVIG Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Danemark

Tel.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98

E-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com

