

CONTA-GUARD™

Mode d'emploi – Etape par Etape



1



Enlever le film de protection de la feuille CONTA-GUARD™. Placer la feuille CONTA-GUARD™ sur le capuchon de l'aiguille, face autocollante dirigée vers le haut.

2



Placer la seringue ainsi préparée dans le socle CONTA-GUARD™. Juste avant l'injection, appuyer sur les leviers du socle et retirer la seringue.

3



Le capuchon de l'aiguille avec la feuille CONTA-GUARD™ restent sur le socle lors de l'injection.

4




Après l'injection, d'une seule main, placer la seringue sur le socle en replaçant l'aiguille dans son capuchon. Retirer la seringue du socle et dévisser l'aiguille de la seringue.

5



Replier la feuille autocollante CONTA-GUARD™ autour de la base de la seringue.

6

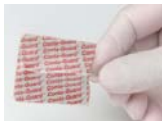

L'aiguille est maintenant complètement scellée et peut être éliminée en toute sécurité.

AVERTISSEMENT ! Veiller à ne pas traverser le capuchon avec la pointe de l'aiguille. Prendre toutes les précautions lors de l'insertion de l'aiguille dans son capuchon sur le socle CONTA-GUARD™.

Ne pas manipuler l'aiguille sans protection après utilisation !

Fabricant



RÖNVIG Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 . DK-8721 Daugaard
Tél. : +45 70 23 34 11 - Fax : +45 76 74 07 98

Distributeur pour la France



120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
Tél. : +33 (0)4 90 42 92 92
Fax : +33 (0)4 90 42 92 61