

# SurgiTel®

## ECLIPSE® LED

### GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

#### ETAPE 1 - MISE SOUS TENSION DE L'ECLAIRAGE

Respecter un temps de préchauffage de 60 secondes avant d'utiliser le détecteur de mouvement, et ajuster l'intensité aux conditions d'éclairage ambiant.

#### ETAPE 2 - UTILISATION DU DETECTEUR DE MOUVEMENT

- A. Tout d'abord, avancer la main à une vingtaine de cm environ devant le détecteur de mouvement de l'éclairage Eclipse LED. (Fig.1)
- B. Puis, bouger doucement la main vers le détecteur de mouvement pour allumer ou éteindre l'éclairage Eclipse LED. (Fig.2)



Fig.1



Fig.2

**SurgiTel®**

division de **General Scientific Corporation**

77 Enterprise Drive • Ann Arbor  
MI 48103-9503 • (800) 959 0153

(734) 996 9200 • Fax : (734) 662 0520

E-mail info@surgitel.com • www.surgitel.com

Distribué par :

**bisico**  
AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITE

Bisico France • 120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence • [www.bisico.fr](http://www.bisico.fr)

▶ N° Vert 0 800 247 420

# *SurgiTel*<sup>®</sup>

## ECLIPSE<sup>®</sup> LED

### NETTOYAGE

### **\*IMPORTANT\***



- Eviter de passer l'éclairage sous l'eau courante ou de lui vaporiser directement des sprays désinfectants. De préférence, l'essuyer avec précaution à l'aide d'un tissu humide.
- S'assurer que le détecteur de mouvement soit nettoyé quotidiennement, à l'aide d'un tissu non-abrasif, avant et après chaque procédure.
- Se référer au mode d'emploi des Eclairages SurgiTel pour plus d'informations concernant le nettoyage de votre système d'éclairage LED.

#### **REMISE EN ETAT DE PROPRETE EN NOS ATELIERS :**

Pouvant être proposée si vous rencontrez une situation de nettoyage difficile. Veuillez contacter le Service Après-Vente pour plus d'informations.