

Vibra-Post Tip

INSERT ULTRASONIQUE POUR DEPOSE DE TENONS



INTRODUCTION

L'insert Vibra-Post Tip est un insert ultrasonique unique capable de délivrer une onde continue de vibrations ultrasoniques accompagnée d'une irrigation abondante. Les inserts conventionnels ont une extrémité généralement ronde et délivrent des vibrations intermittentes sur une zone de contact minimale, sans irrigation. L'extrémité de l'insert Vibra-Post Tip est creuse, ce qui lui permet de s'engager autour de la tête du tenon. Ce logement conique interne s'adapte à tous les diamètres de tenons. En comparaison aux autres produits du marché, l'insert Vibra-Post Tip offre des résultats plus sûrs et prédictibles tout en étant plus efficace.

Type	Appareil ultrasonique compatible	Puissance recommandée
A (ex : VP-A)	SATELEC	60 % de la puissance maximale
E (ex : VP-E)	EMS	60 % de la puissance maximale

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ① Déposer le matériau de restauration autour du tenon.
- ② A l'aide d'une fraise sur contre-angle ou turbine, réduire le diamètre de la partie la plus coronaire du tenon jusqu'à 0,6 mm.
- ③ Placer l'insert sur la tête préparée du tenon et actionner l'appareil ultrasonique, avec une irrigation abondante durant toute la procédure de dépose du tenon (En cas de non-utilisation d'irrigation, réaliser des cycles de 15 secondes à la fois, afin de ne pas endommager le ligament parodontal par une production locale excessive de chaleur).
- ④ L'utilisation de l'énergie ultrasonique descelle le tenon.
- ⑤ Retirer le tenon à l'aide de précelles ou d'une pince hémostatique.

NETTOYAGE ET STERILISATION

S'assurer du respect de la procédure de stérilisation de l'insert selon les recommandations ci-dessous avant toute utilisation.

- ① Utiliser un détergent doux et un bac à ultrasons.
- ② Sécher parfaitement les inserts avant leur stérilisation à l'autoclave.
- ③ Procéder à la stérilisation des inserts à l'autoclave à 134°C (273.2°F) pendant 10 minutes (pression de 2.6 kgf/cm²).
- ④ Eviter le contact avec d'autres types d'instruments après stérilisation.

DESCRIPTION DES SYMBOLES



Date de fabrication



Fabricant



Attention, Consulter le mode d'emploi



Marquage CE



Numéro de lot



Représentant Européen



B&L Biotech, Inc, 502, Gungjun tower, 727-3 Gojan-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 425-906



Emergo Europe, Molenstreet 15, 2513 BH, The Hague, The Netherlands

Distributeur exclusif France

Bisico France - 120 allée de la Coudoulette - 13680 Lançon de Provence - France - Tél. : 04 90 42 92 92 - Fax : 04 90 42 92 61 - www.bisico.fr

Marquage CE obtenu en Février 2010