




DENTO-PREP™

DUST-CABINET

MODE D'EMPLOI

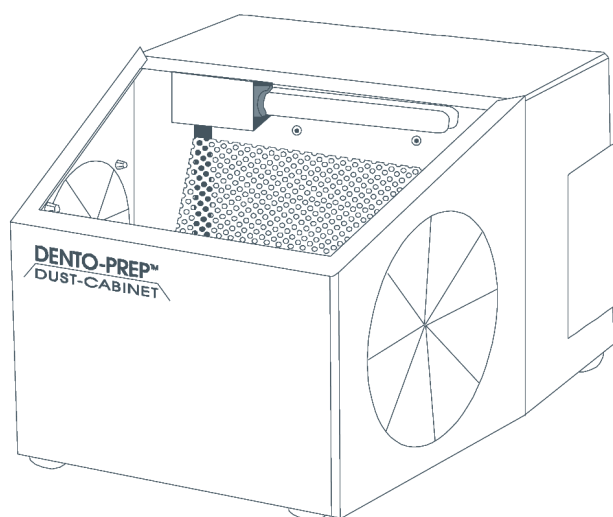

Article No. 1902 : 115 VAC / 50-60 Hz 30 W

Article No. 1903 : 230 VAC / 50-60 Hz 30 W

Préparation

Placer le néon dans son logement, brancher le cordon d'alimentation et votre cabine de sablage DUST-CABINET est prête à être utilisée. La vitre de la cabine de sablage DUST-CABINET peut être enlevée en la poussant / la faisant glisser vers le haut.

Entretien

Un nettoyage régulier de la cabine de sablage DUST-CABINET est recommandé - enlever la vitre et aspirer la poudre usagée.

La cabine de sablage DUST-CABINET est équipée d'un filtre à poussière qui protège le système d'aspiration électronique intégré contre la poudre soufflée à l'intérieur de la cabine. Le filtre doit être retiré régulièrement et nettoyé (par aspiration). Retirer le filtre par la petite trappe située sur le côté de la cabine.

Résolution de problèmes

Pas de lumière	= changer le néon
Pas de lumière et d'aspiration	= changer le fusible
Aspiration faible	= nettoyer le filtre

Fabricant

RØNVIG Dental Mfg. A/S
 Gl. Vejlevej 59, DK-8721 Daugaard, Denmark.
 Tel.: (+45) 70 23 34 11, Fax: (+45) 76 74 07 98,
 email: export@ronvig.com, www.ronvig.com

Informations techniques

Dimensions :	H 18 cm x L 22,5 cm x P 31,5 cm
Poids :	4,130 kg
Alimentation :	Article No. 1902 : 115 VAC / 50-60 Hz 30 W Article No. 1903 : 230 VAC / 50-60 Hz 30 W
Néon :	PL-S 4P 9W 600 lumens, 840
Fusible :	1 AT
Matériaux :	Cabine : Acier laqué par poudrage Vitre : Verre trempé

