


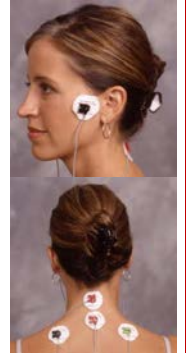

J5 Myo-monitor

Stimulation électrique musculaire – Etape par Etape

- ① **Contrôler l'état de santé du Patient.** Consulter le Patient et revoir les contre-indications référencées dans le Guide d'utilisation du J5 Myo-monitor, avant de procéder à la stimulation électrique musculaire.
- ② **Prévenir le Patient** de ce qu'il va ressentir au cours de son expérience de stimulation électrique musculaire. Il ressentira d'abord une légère sensation de fourmillements lorsque les muscles recevront une impulsion électrique (sensation qui s'atténuera au fur et à mesure de la stimulation). Les muscles se contracteront toutes les 1,5 secondes et la procédure de stimulation électrique musculaire durera de 45 à 60 minutes.
- ③ **Nettoyer la peau au niveau des emplacements des électrodes et placer les électrodes Myotrodes SG.** Ces emplacements sont au nombre de 6 – 2 sur les fossettes coronoïdiennes, 2 sur les muscles trapèzes supérieurs et 2 sur la nuque. Nettoyer soigneusement la peau à l'aide d'une gaze imprégnée d'alcool, en s'assurant d'éliminer toute trace de maquillage, huile de soins, etc. Placer les électrodes sur la peau nettoyée et séchée du Patient (Cf. Guide d'utilisation).
- ④ **Préparer le J5 Myo-monitor et les cordons de connexion** pour démarrer la procédure de stimulation électrique musculaire.
 - ☞ Eteindre le J5 Myo-monitor
 - ☞ Positionner à « 0 » la commande d'amplitude des voies A et B
 - ☞ Positionner au centre la commande de la balance des voies A et B
 - ☞ Connecter de manière sécurisée les cordons aux électrodes placées sur le Patient.
 - ◆ NOIRS - à la GAUCHE du Patient
 - ◆ VERTS - à la DROITE du Patient
 - ◆ ROUGES - sur la nuque du Patient
 - ☞ S'assurer que l'extrémité des cordons de connexion soit complètement insérée au J5 Myo-monitor.
- ⑤ **Démarrer la procédure de stimulation électrique musculaire.** Allumer le J5 Myo-monitor et régler l'amplitude de la voie A jusqu'à amener le Patient au STADE 1 de la stimulation électrique musculaire – où il doit ressentir une légère sensation de fourmillements de ses muscles faciaux.
- ⑥ **Augmenter graduellement l'amplitude** jusqu'à amener le Patient au STADE 2 de la stimulation électrique musculaire – où le Patient cligne des yeux à chaque impulsion. S'assurer que le Patient s'y habitue avant de procéder à l'étape suivante. Demander au Patient s'il ressent la même stimulation des deux côtés du visage et ajuster la balance en fonction afin de garantir des contractions bilatérales équilibrées.
- ⑦ **Régler le seuil initial de stimulation.** Augmenter l'amplitude jusqu'à amener le Patient au STADE 3 – (au premier signe de soulèvement de la mandibule – où la mandibule doit se soulever d'1 mm). **Pour vérifier le soulèvement de la mandibule, demander au Patient de fermer doucement la bouche sur le gant de votre petit doigt ; vous devriez alors ressentir le soulèvement de la mandibule lors de chaque impulsion.** S'assurer que les dents des arcades supérieure et inférieure **n'entrent pas en contact** durant la procédure de stimulation électrique musculaire.
- ⑧ **Répéter les étapes 5, 6 et 7** pour la voie B. Les muscles trapèzes supérieurs du Patient doivent montrer des contractions bilatérales équilibrées.
- ⑨ **Relaxer votre Patient.** Installer le Patient dans un environnement calme et relaxant, lui proposer une couverture si nécessaire. S'il est en position inclinée, veiller à ce que celle-ci ne soit supérieure à 30°.
- ⑩ **Contrôler votre Patient** toutes les 10 à 15 minutes. Si nécessaire, ajuster les commandes de la balance et de l'amplitude durant la procédure de stimulation électrique musculaire, afin de s'assurer que les dents n'entrent pas en contact et que la mandibule se soulève d'environ 1 mm.



CE 0413

Myotronics-Noromed, Inc.
5870 S 194th Street, Kent, WA 98032
(206) 243-4214 (800) 426-0316 FAX (206) 243-3625
www.myotronics.com • info@myotronics.com

© Copyright Myotronics, Inc. 2005