



Smile Lite (#6500)

- Shade matching for the specialist
- Farbbestimmung für den professionellen Anwender
- Toma de color para el especialista
- Rilevazione del colore per lo specialista
- Prise de teinte pour le professionnel
- Tomada de cor pelo especialista

Upper side view

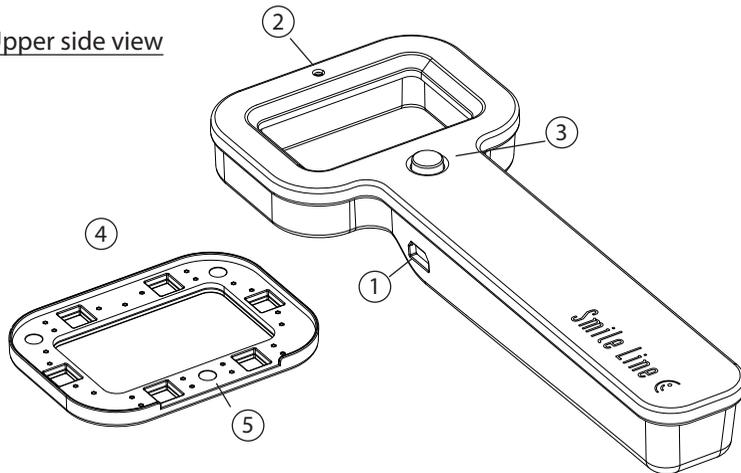

Upside down view

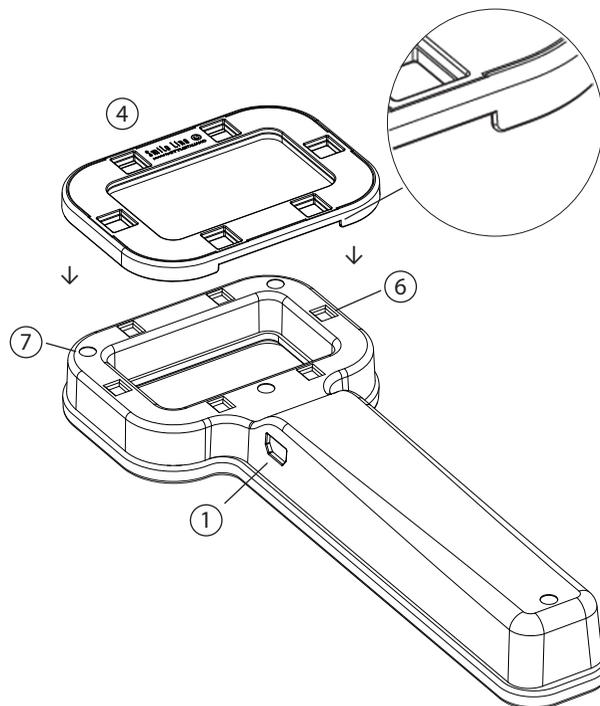

Contenu

- Lampe Smile Lite
- Filtre polarisant « Style LENSE »
- Chargeur-adaptateur + câble mini-USB
- Carré micro-fibre
- Instructions

Vous avez fait l'acquisition d'une lampe « Smile Lite » pour la prise de teinte des dents et nous vous félicitons de votre choix. Avant de l'utiliser, veuillez à respecter les instructions ci-dessous.

AVANT LE PREMIER EMPLOI

Chargez intégralement la batterie de votre Smile Lite au moyen des accessoires fournis. Branchez le câble mini-USB à la prise (1) sur le côté de votre Smile Lite et l'autre extrémité du câble USB directement sur votre PC ou sur l'adaptateur livré et ce dernier sur une prise du secteur. Lorsque la batterie est en charge, une petite lumière verte (2) va s'allumer : elle s'éteindra automatiquement lorsque la charge sera terminée.

Note 1 : lorsque la batterie est complètement déchargée le temps de charge est de 4 heures.

Note 2 : la batterie Lithium-Ion permet à la lampe de fonctionner sans interruption durant 4 heures environ.

DESCRIPTION

Smile Lite utilise des LEDs (Light Emitting Diodes) dont la température de couleur est de 5500 °K. La qualité de lumière reproduite est celle de la lumière du jour (neutre). Smile Lite a été développée pour permettre au praticien une prise de teinte dynamique dans les meilleures conditions possibles, n'importe le moment de la journée et la luminosité ambiante. Le but est d'offrir toujours les mêmes conditions d'éclairage, de la simplicité et de l'efficacité, tout en réduisant de manière drastique le risque d'erreurs.

UTILISATION

Smile Lite est tout simplement équipée d'un bouton « marche-arrêt » (3). Durant la prise de teinte, l'opérateur tient la lampe à une distance de 10-15cm des dents. La fenêtre rectangulaire sert d'écran de visualisation.

ATTENTION :

1° Une légère pression sur le bouton est suffisante. Le fait de ne pas respecter ce conseil et d'employer constamment une pression élevée et répétée risque, à terme, d'endommager le circuit électronique.

2° L'électronique ne permet pas une fonction « marche - arrêt - marche » instantanée. En fait, un temps de pause de 1.5" à 2.0" est nécessaire entre deux pressions du bouton. Le fait de vouloir presser le bouton de manière rapide et répétée ne sera d'aucune aide pour accélérer la fonction.

Filtre polarisant (Style LENSE)

Veuillez prendre note ici du fait qu'il n'existe qu'une seule position juste (et possible) pour le montage du filtre polarisant (4) sur la lampe. Celui-ci tient sur Smile Lite au moyen de 3 petits aimants (5). Étudiez attentivement le croquis pour comprendre comment le filtre doit être monté en recouvrement de la surface des LEDs. Le filtre est un composant délicat et doit être manipulé avec grand soin. NE PAS toucher la partie film du filtre avec les doigts.

Le filtre polarisant Style LENSE annihile la réflexion de lumière (spéculaire et diffuse) et permet à l'opérateur d'observer les dents d'un œil totalement nouveau, tant pour ce qui concerne la couleur, la profondeur et les transparences. Le filtre met également en évidence le noyau dentinaire et se fait révélateur des détails et caractéristiques internes. Il sera très instructif d'alterner une observation des dents avec et sans le filtre polarisant pour une prise de teinte dynamique.

NETTOYAGE

Smile Lite n'est pas stérilisable. Au-delà de ceci, l'utilisateur évitera tout contact de la lampe avec de l'eau ou tout autre liquide. Le nettoyage de Smile Lite se fera exclusivement à l'aide du carré micro-fibre livré dans l'emballage d'origine, ou d'un chiffon doux similaire.

PRÉCAUTIONS

- Appareil à usage professionnel uniquement – à tenir hors de portée des enfants
- Éviter tout contact de Smile Lite avec de l'humidité
- Informer le patient de ne pas fixer les LEDs allumées
- Éviter tout contact des LEDs directement avec les dents, autres parties du corps ou tout objet
- Smile Lite n'est PAS stérilisable
- Manipuler le filtre polarisant avec grand soin en prenant garde de ne pas toucher le film avec les doigts

Légende

1 - Prise pour câble USB

2 - Témoin de charge (lumière verte durant le temps de charge)

3 - Bouton marche-arrêt

4 - Filtre polarisant Style LENSE

5 - Aimants (x 3)

6 - LEDs (x 6)

7 - Vis (x3)