
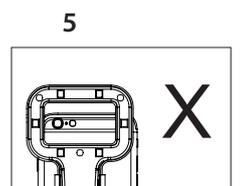
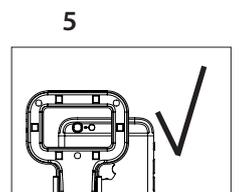
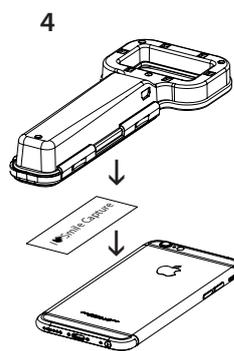
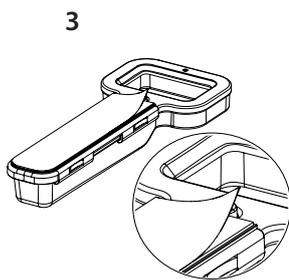
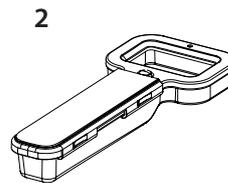
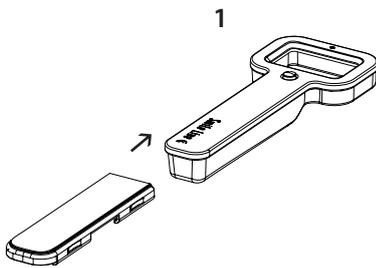
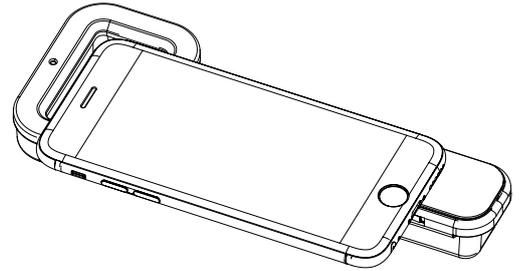


- Universal adapter Smile Lite/Smile Capture
- Universaladapter Smile Lite/Smile Capture
- Adaptador universal Smile Lite/Smile Capture
- Adattatore universale Smile Lite/Smile Capture
- Adaptateur universel Smile Lite/Smile Capture
- Adaptador universal Smile Lite/Smile Capture

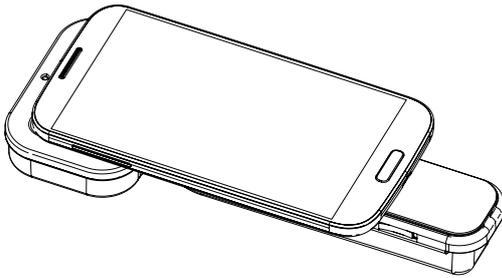

ITEMS NO.

| | |
|---|---------|
| SmartConnect, Universal adaptor | #6560 |
| Smile Lite, full set inclu. Style Lense | #6500 |
| Smile Capture NEW, full set | #6550-N |

L'adaptateur SmartConnect Universal a été créé pour pouvoir coupler votre Smile Lite à la plupart des modèles de smartphones et tablettes tactiles dans le but de réaliser des photos intraorales. Pour ceci, Smile Line a utilisé un matériau relevant de la nano-technologie, le « Suction Cup Tape », qui est muni d'une multitude de micro-ventouses. Grâce à ce matériau, vous pouvez littéralement « coller » votre Smile Lite sur votre smartphone/tablette en toute liberté de manière provisoire.

Utilisation

1.- Faites glisser le SmartConnect sur le manche de votre Smile Lite (images 1 et 2). Ceci fait et avant toute autre opération, présentez votre Smile Lite équipée de l'adaptateur sur votre smartphone/tablette du côté de la caméra pour vous rendre compte de la position définitive.

2.- Détachez délicatement la pellicule de protection pour découvrir la surface adhérente « Suction Cup Tape » (image 3).

Veuillez svpl lire attentivement les spécificités du matériau et les précautions à observer durant l'utilisation (voir plus bas: AVERTISSEMENT).

IMPORTANT: texture de la surface de votre smartphone/tablette

Assurez-vous que la surface sur laquelle vous désirez fixer l'adaptateur soit la plus lisse et propre possible. Dans le cas où la surface est brossée ou légèrement structurée (comme par exemple au dos des iPad), nous vous recommandons d'appliquer au préalable les autocollants fournis à l'endroit où vous souhaitez fixer l'adaptateur. Les autocollants offrent une surface extrêmement lisse et assurent une adhérence optimale.

Note : l'autocollant peut être ajouté à tout moment et après quelques essais de positionnement de l'adaptateur SmartConnect.

3.- Présentez la Smile Lite équipée de l'adaptateur SmartConnect du côté de l'objectif de votre smartphone/tablette (image 4). Avant que les deux surfaces n'entrent en contact, assurez-vous que l'objectif soit centré par rapport à la fenêtre de la Smile Lite (image 5). Lorsque le positionnement est correct, pressez légèrement la Smile Lite et votre smartphone/tablette ensemble.

4.- Pour accéder à l'interrupteur et allumer votre Smile Lite, faites la légèrement glisser hors de l'adaptateur SmartConnect et remettez-la en place allumée pour votre prise de photos.

5.- Pour désolidariser la Smile Lite de votre smartphone/tablette, faites d'abord glisser la Smile Lite hors de l'adaptateur SmartConnect. Pour détacher l'adaptateur SmartConnect, exercez une traction à l'extrémité de l'adaptateur pour le soulever de son support. Selon la pression avec laquelle vous l'aurez fixé, il se détachera avec plus ou moins de facilité.

AVERTISSEMENT – indications importantes au sujet de «Suction Cup Tape»

Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'adhérence est correcte et que votre smartphone/tablette ne risque pas de chuter – Smile Line ne sera en aucun cas tenue pour responsable en cas d'accident.

Nettoyage

Au fil du temps la surface « Suction Cup Tape » perdra un peu de sa force d'adhésion. Ceci est dû à la poussière obstruant une partie des micro-ventouses. En tout temps, vous pouvez nettoyer et réactiver la surface « Suction Cup Tape » : humidifiez un tissu microfibre et frottez délicatement la surface puis séchez-la toujours au moyen de la microfibre.

Attention : n'utilisez pas de tissus ou papier pouvant déposer des poussières. La surface doit être 100% sèche avant de réutiliser l'adaptateur.

Rangement

Il est recommandé de ranger le SmartConnect Universal dans une boîte fermée à l'abri des poussières. Il est également possible de protéger la surface « Suction Cup Tape » en la recouvrant simplement d'une feuille PE (par exemple son propre sachet d'emballage).