



Photo-Mirror-Demister (PMD)

Miroir anti-buée pour photographie intra-orale

Mode d'emploi

Nous vous prions de lire attentivement les instructions d'utilisation suivantes avant de commencer à utiliser ce dispositif.

Industriestr. 2, 69207 Sandhausen, Germany | Tel.: +49 6224 145 644, Fax: +49 6224 145 111 | info@jakobi-dental.de

PM-Demister Aperçu



1. Système de ventilation : La prévention de la buée sur le miroir est obtenue par la projection locale d'un jet d'air.
2. Les LEDs assurent un meilleur éclairage lors du réglage des paramètres requis pour la prise de vue envisagée. La surface du miroir est éclairée par les LEDs, contribuant ainsi à faciliter la mise au point dans des conditions d'éclairage inadéquates.
3. Manche pour miroirs : le miroir photographique est fixé de manière sécurisée entre deux patins en caoutchouc à l'aide d'une vis de fixation.
4. Connecteur Micro-USB : utilisé pour recharger la batterie.

Fonctionnement

La batterie fournie est insérée dans le logement prévu. Veiller à un positionnement correct des contacts de la batterie.

Raccorder le cordon d'alimentation du chargeur via le connecteur Micro-USB du manche PMD et le brancher sur une prise de courant.

Durant tout le processus de chargement, la LED rouge sera clignotante. La charge est complète lorsque la LED rouge s'éteint. Débrancher alors le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Avant d'insérer le miroir dans le manche PMD, desserrer la vis de fixation.



Industriestr. 2, 69207 Sandhausen, Germany | Tel.: +49 6224 145 644, Fax: +49 6224 145 111 | info@jakobi-dental.de

Le miroir est inséré entre les deux mâchoires en caoutchouc du dispositif de serrage.

En resserrant la vis, le miroir est fixé de manière sécurisée au dispositif.

En pressant la touche , la ventilation et l'éclairage sont mis sous ou hors tension simultanément. En pressant la touche  / , la puissance de ventilation est graduellement augmentée / diminuée. Après 30 secondes d'utilisation, le niveau de puissance sélectionné sera automatiquement mémorisé.

Le PM-Demister est maintenant prêt à l'emploi.




Industriestr. 2, 69207 Sandhausen, Germany | Tel.: +49 6224 145 644, Fax: +49 6224 145 111 | info@jakobi-dental.de




FSFDM01 (JK 010)

Occlusal, Adultes

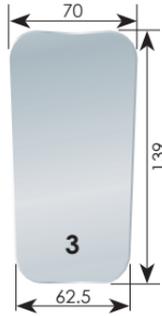


FSFDM03 (JK 012)

Occlusal, Adultes

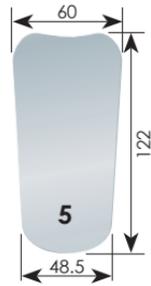


FSFDM05 (JK 014)

Occlusal, Enfants

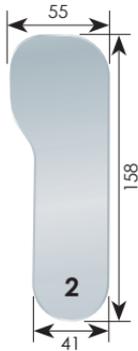


FSFDM02 (JK 011)

Latéral/Lingual, Adultes

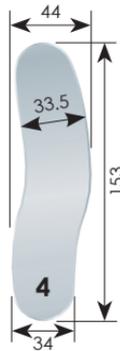

FSFDM04 (JK 013)

Latéral, Enfants

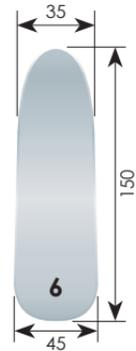

FSFDM06 (JK 015)

Latéral, Universel

Industriestr. 2, 69207 Sandhausen, Germany | Tel.: +49 6224 145 644, Fax: +49 6224 145 111 | info@jakobi-dental.de

Caractéristiques opérationnelles :

1. Batterie Lithium-Ion 3.7 V, 900 mAh
2. Durée de chargement d'environ une heure
3. Autonomie (batterie complètement chargée) : environ 4 heures
4. Spécifications du chargeur
 - a. Entrée : WS 100~240 V, 50/60 Hz
 - b. Sortie : 5 V, 1000 mA

Chargement de la batterie

Utiliser exclusivement le cordon d'alimentation USB original fourni pour charger la batterie.

Avant la première utilisation, la batterie doit être complètement chargée selon ces instructions.

Précautions de sécurité

- ♦ Ne pas tenter d'effectuer vous-même des réparations. Les réparations doivent uniquement être réalisées par Jakobi Dental Instruments.
- ♦ Veuillez ne pas démonter le dispositif.
- ♦ Veuillez utiliser exclusivement la batterie et les accessoires originaux fournis.
- ♦ Ne pas court-circuiter et ne pas tenter d'ouvrir la batterie (risque d'explosion).
- ♦ La pièce à main ne peut être stérilisée.
- ♦ La surface de la pièce à main PMD peut être désinfectée à l'aide de lingettes désinfectantes sans aldéhydes et de préférence sans colorant ni parfum.
- ♦ Le cordon d'alimentation Micro-USB fourni est exclusivement dédié à une utilisation avec Photo-Mirror-Demister (PMD).

Contenu :

1. Photo-Mirror Demister (PMD)
2. Batterie Lithium-Ion (3.7 V / 900 mAh)
3. Cordon d'alimentation & connecteur Micro-USB
4. Mode d'emploi

Industriestr. 2, 69207 Sandhausen, Germany | Tel.: +49 6224 145 644, Fax: +49 6224 145 111 | info@jakobi-dental.de

Garantie Qualité

Un an à partir de la date d'achat.

Durant cette période, tous les défauts du dispositif dus à des matériaux défectueux ou des vices de fabrication seront pris en charge. Au cours de la période de garantie, vous avez droit à la réparation gratuite ou au remplacement. Veuillez conserver votre preuve d'achat durant toute la période de garantie. Si la responsabilité de l'utilisateur final est engagée dans la survenue de défauts, le coût des réparations correspondantes, y compris durant la période de garantie, sera à sa charge.

Service Après-Vente

Pour obtenir des services complémentaires, par exemple le réassort d'accessoires (batterie, cordon d'alimentation micro-USB, etc.) veuillez contacter notre Distributeur pour la France.

Distributeur : Bisico France

120 allée de la Coudoulette | 13680 Lançon de Provence | France |
Tél. : 04 90 42 92 92 | Fax : 04 90 42 92 61 | svce.commercial@bisico.fr |
www.bisico.fr

Fabricant : Jakobi Dental Instruments

Industriestrasse 2 | 69207 Sandhausen | Allemagne |
Tél. : +49 6224 145644 | Fax : +49 6224 145111 | info@jakobi-dental.de

Marquage CE obtenu en Juin 2012 

Industriestr. 2, 69207 Sandhausen, Germany | Tel.: +49 6224 145 644, Fax: +49 6224 145 111 | info@jakobi-dental.de