

Pistolet pour capsules GCP CarboCap CC-01

Instructions de stérilisation

Le pistolet pour capsules CarboCap CC-01 sert à l'activation et à l'injection des matériaux conditionnés en capsules de GCP Dental.

Nettoyage et Désinfection

Les résidus de ciment doivent être immédiatement éliminés.

Le pistolet CarboCap peut être nettoyé à l'aide d'une gaze imbibée d'alcool ou dans un bain ultrasonique. Les désinfectants chimiques et agents de stérilisation peuvent être utilisés selon les instructions du fabricant.

Note : Il est recommandé d'utiliser une solution désinfectante contenant un inhibiteur de corrosion.

Stérilisation

Le pistolet CarboCap peut être autoclavable à 134 - 137°C pendant 3 - 3,5 minutes. Veuillez suivre les instructions du fabricant.

Note

Stériliser le pistolet CarboCap avant utilisation.

Conserver le pistolet CarboCap dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Exclusivement réservé à un usage dentaire !

Marquage CE obtenu en Mai 2012

GCP Dental b.v. Mijlweg 5A 4131 PJ Vianen The Netherlands Tél. : +31(0)30 8200 545 Fax : +31(0)30 8200 544 - www.gcp-dental.com

Distribué en France par :  Bisico France, 120 Allée de la Coudoulette, 13680 Lançon de Provence.
Tél. : +33 (0)4 90 42 92 92 Fax : +33 (0)4 90 42 92 61 - www.bisico.fr - svce.commercial@bisico.fr