


# Mode d'emploi du thermoformeur

modèle EV02.

Merci de lire ces instructions avant utilisation de l'appareil.

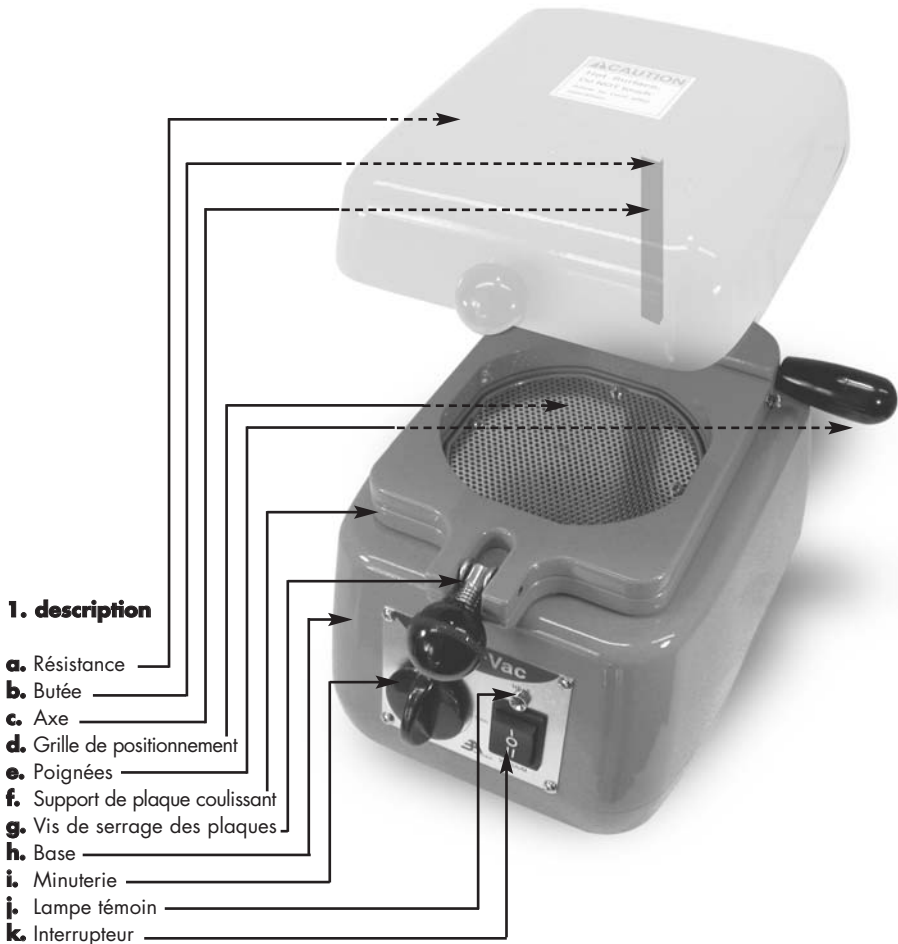

## 1. description

- a. Résistance
- b. Butée
- c. Axe
- d. Grille de positionnement
- e. Poignées
- f. Support de plaque coulissant
- g. Vis de serrage des plaques
- h. Base
- i. Minuterie
- j. Lampe témoin
- k. Interrupteur

## 2. Spécifications

- a. Modèle EV2
- b. Puissance d'entrée : AC 220-240V, 50 – 60 Hz
- c. Puissance de sortie : résistance : 550 W, moteur 1250 W

## 3. installation

- a. Mise en place des poignées (e) : visser chaque poignée dans les trous situés de part et d'autre du support de plaque coulissant.
- b. Alimentation : brancher la prise du thermoformeur à une prise 220V



#### 4. Utilisation

- a. Ouvrir le support de plaque en desserrant la vis de serrage (g)
- b. Positionner une plaque carrée ou ronde
- c. Refermer le support de plaque et serrez lavis
- d. Faire coulisser l'ensemble vers le haut le long de l'axe à l'aide des poignées jusqu'à la butée.
- e. Positionner le modèle sur la grille
- f. Régler la minuterie et positionner l'interrupteur en position I (le témoin lumineux est alors allumé) la résistance doit être tournée vers l'arrière de la machine.
- g. Attendre 2 minutes à 2minutes 30 que la résistance soit suffisamment chaude
- h. Tourner la résistance sur la gauche et attendre que la plaque soit prête à l'emploi (le temps dépendra de la plaque utilisée)
- i. Positionner l'interrupteur sur la position II (aspiration en marche)
- j. Faire descendre le support de plaque jusqu'au contact avec la base
- k. Attendre 10 à 60 secondes que la plaque soit parfaitement aspirée et plaquée au modèle
- l. Eteindre l'aspiration et fermer le minuteur
- m. Positionner la résistance à l'arrière de la machine (rotation de 180° à droite)
- n. Ouvrir le support de plaque en dévissant la vis de blocage.
- o. Retirer la plaque.
- p. Débrancher la machine.

#### 5. Précautions

- a. Le capot protégeant la résistance est très chaud après utilisation. Ne pas le toucher pas tant qu'il n'a pas refroidi.
- b. Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées ou humides, ne pas tenter pas d'insérez quoi que ce soit dans l'appareil.
- c. Veiller à toujours éteindre la résistance et débrancher l'appareil après chaque utilisation.

#### 6. Entretien et stockage

- a. Tenir hors de la portée des enfants et tenir éloigné de toute source de chaleur ou de liquide.
- b. Stockage : température de -10 à 70 °C, Humidité : 10 à 100%, pression : 50 à 106 KPa
- c. En cas de problème, contacter votre revendeur.

#### 7. Garantie

- a. le fabricant certifie que le présent appareil est exempt de tout défaut et garantie un (1) an à compter de la date d'achat.
- b. Cette garantie ne sera pas appliquée si les dommages sont liées à une négligence, une mauvaise utilisation, le non respect des indications ci-avant, toute tentative de réparation par une personne non autorisée, toute modification apportée à la machine.



**Bisico France**  
L'opéra - BP 60  
13680 Lançon de Provence

APPEL GRATUIT  
**N° Vert 0 800 247 420**  
BISICO