

CarboMIX

Vibreux de capsules universel



Caractéristiques

- Universel
- Puissant et silencieux
- Affichage numérique
- 2 temps de malaxage programmables
- Temps de malaxage contrôlés par microprocesseur
- Démarrage par une touche unique du programme mémorisé
- Arrêt automatique de sécurité à l'ouverture
- Design ergonomique

Description

CarboMIX est un vibreur de capsules universel puissant et silencieux conçu pour le mélange des ciments verres carbomères en capsules tels que Glass Fill, mais également de tout autre matériau conditionné en capsules.

Dans sa nouvelle version, deux programmes peuvent être déterminés par l'utilisateur et rapidement réglés selon le matériau à utiliser (temps de malaxage ajustable de 1 à 30 secondes). L'affichage numérique permet une lecture rapide et indique le temps de malaxage restant, contrôlé par microprocesseur.

Le démarrage par une touche unique du programme mémorisé rend son utilisation facile.

CarboMIX intègre également une fonction de sécurité qui stoppe toute opération en cas d'ouverture accidentelle du couvercle.

Son design ergonomique permet un entretien rapide et facile.

Indications

- Mélange des ciments verres carbomères ou autres matériaux en capsules

CarboMIX

Vibreux de capsules universel



Procédure



Pousser le piston de la capsule sur une surface plane.



Placer la capsule dans le pistolet et cliquer une fois.



Choisir le programme selon le matériau à utiliser et vibrer le temps indiqué (selon le programme ou choix de l'utilisateur).



Retirer le bouchon de la capsule et injecter directement à l'aide du pistolet.

Images fournies par le fabricant.

Le + Bisico

Un vibreur d'excellente conception, à la fois simple, universel et ergonomique.

On aime

- La simplicité de mise en route
- La programmation de temps de malaxage
- La fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Le nettoyage facile


Références

GC 016 - Vibreur de capsules CarboMIX

Produits complémentaires

- Glass Fill
- CarboCAP



Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE - Classe I -  GCP Dental. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé. Fiche CarboMIX (ZZ 692) - V2 - 11/2013. Ne tient pas lieu de mode d'emploi.