

TENDER PINK

LA PASSION DE L'ESTHETIQUE



Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0297 DQS - Classe IIa - Fabricant GDF. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé. DC Enamel Plus Tender Pink (ZZ 534) - V2 - 01/2011.



Tender Pink est le système le plus innovant pour la reproduction des tissus gingivaux au cabinet dentaire et au laboratoire de prothèse.

Il est disponible en 4 teintes : Pink Dark, Pink Light, Pink Orange et Pink Transparent.

Le résultat chromatique peut être amélioré par l'utilisation de colorants Enamel Plus Tender Stain Blue (bleu), White (blanc), Red (rouge), qui peuvent s'utiliser seuls ou mélangés ensemble.

Colorants



Pink Transparent



Pink Light




Pink Dark



Pink Orange



Caractérisation de la gencive au niveau des prothèses amovibles et implantaires

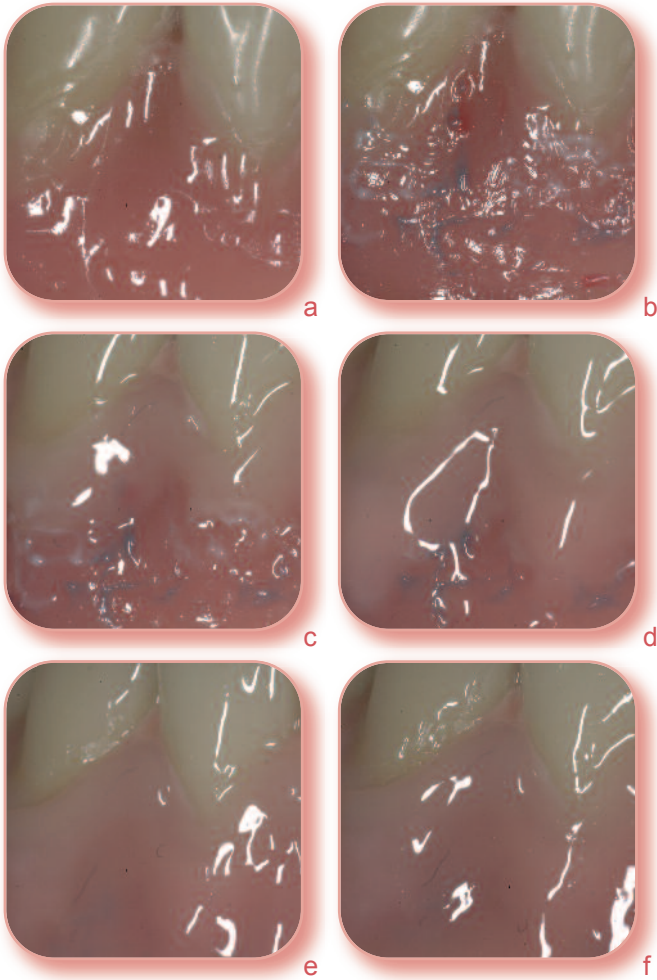

- a. **Temp Bonding Fluid** permet l'adhésion d'un composite photopolymérisable sur une résine méthacrylate de méthyle.
- b. Tender Stain **White** augmente l'opacité et la teinte de la **papille ischémique** ou au niveau des zones de proéminence osseuse. Tender Stain **Red** augmente la chromaticité du composite rose et **simule les veines**. Tender Stain **Blue** augmente les effets au niveau du **foramen** et des **petites veines**.
- c. Tender Pink **Transparent** reproduit la **zone cervicale** où la gencive recouvre la dent et non pas l'os.
- d. Tender Pink **Light** reproduit la zone **supra-radicaire** où la gencive est ferme et transparente.
- e. Tender Pink **Dark** reproduit la zone où la gencive est moins ferme et moins adhérente à l'os, **hautement vascularisée** avec une teinte rouge-bleue au niveau de la zone du foramen.
- f. Tender Pink **Orange** (également disponible en version **Flow**) est utilisé en première couche ou combiné au colorant Tender Stain White (blanc) pour reproduire la couleur typique de la **proéminence osseuse des rebords gingivaux**.

Micerium Enamel Plus

Tender Pink : Le système de reproduction et de caractérisation de la gencive

Masquage

MC00373 Pâte Opaque Pink (seringue 3 g)

Colorants photopolymérisables Teintes pour caractérisation de la gencive

MC00405 Teinte Blanc (flacon 3 g)

MC00413 Teinte Rouge (flacon 3 g)

MC00406 Teinte Bleu (flacon 3 g)

Composite Tender Pink

MC00368 Teinte Pink Orange TP (seringue 5 g)

MC00369 Teinte Pink Light TPL (seringue 5 g)

MC00370 Teinte Pink Dark TPD (seringue 5 g)

MC00371 Teinte Pink Transparent TPT (seringue 5 g)

Composite Tender Pink Flow

MC00372 Teinte Pink Orange Flow (seringue 5 g)



MC00367 Kit d'introduction Tender Pink

- 1 Tender Pâte Opaque Pink
- 3 Tender Stain (Bleu, Rouge, Blanc)
- 4 Tender Pink (Orange, Light, Dark, Transparent)

Adhésion du composite sur résine méthacrylate de méthyle

MC00361 Résine fluide Temp Bonding (flacon 10 ml)

Adhésion du composite sur céramique

MC00362 Bonding /Metal Primer (flacon 5 ml)

MC00363 Pâte Opaque Clear (seringue 3 g)