

bisico

Gingiform

BISICO Gingiform est un silicone par addition, utilisé pour la reproduction de la gencive lors de la coulée d'un modèle, en particulier lors des restaurations prothétiques conventionnelles ou implanto-portées.

BISICO Gingiform procure des informations importantes concernant les structures environnantes au niveau des zones gingivales.

- Pas de problèmes liés au dosage ou au mélange du produit, le conditionnement en cartouche automélangeuse garantissant un produit homogène et sans bulles
- Reproduction précise et sans tension de la gencive sur le modèle, autour de l'implant ou des dents préparées
- Grande stabilité dimensionnelle et rétraction inférieure à 0,1 % offrant une reproduction stable pendant plusieurs mois et réparable de manière durable
- Dureté finale de 70 Shore A, possibilité de retouches au scalpel, aux ciseaux ou à la sableuse
- Le séparateur en spray inclus assure une parfaite isolation entre BISICO Gingiform et le silicone de l'empreinte

1. L'empreinte doit être coffrée avec BISICO Lutefix, puis traitée avec le séparateur BISICO Gingiform.



2. L'empreinte coffrée est remplie de BISICO Gingiform au niveau de la zone souhaitée. L'embout de la buse, utilisé du fond de l'empreinte vers le haut, permet d'éviter les vides ou les bulles.



3. Une fois le silicone polymérisé, le coffrage est retiré et la gencive peut être ébarbée au scalpel.



4. Le modèle peut maintenant être coulé.



5. L'empreinte ainsi préparée peut être coulée avec du plâtre et positionnée dans un moule préformé.



6. Modèle de travail avec implants et fausse gencive élastique et réparable BISICO Gingiform.



Conditionnements disponibles

BI 252 - Kit de démarrage

1 cartouche double silicone BISICO Gingiform (50 ml)
1 aérosol séparateur BISICO Gingiform (85 ml)
6 buses d'automélange bleues

BI 253 - Recharge (cartouche 50 ml)

1 cartouche double silicone BISICO Gingiform (50 ml)
6 buses d'automélange bleues

BI 254 - Séparateur Aérosol BISICO Gingiform (85 ml)

bisico

Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG • Johanneswerkstraße 3 • D-33611 Bielefeld
Tel.: 0521/8016800 • Fax: 0521/8016801 • Email: info@bisico.de

Rev.-Nr.: 65920-02.2012

bisico
AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ

120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
Tél. : 04 90 42 92 92
www.bisico.fr