

Luer Lock Handpiece

Pièce à main pour embouts d'aspiration

REF FC0003100



Mode d'emploi

Transcodent®
GmbH & Co. KG
Zum Kesselort 53
D-24149 Kiel

Tel. +49(0)431 979 979 0
Fax: +49(0)431 979 979 59
info@transcodent.de
www.transcodent.de

transcodent®

La pièce à main Luer Lock Handpiece Transcodent® peut être fixée sur votre système d'aspiration à l'aide de l'adaptateur fourni. Combinée aux embouts d'aspiration Suction Needles Transcodent®, Luer Lock Handpiece procure un large champ de vision et une aspiration précise au niveau des zones difficiles d'accès, par exemple lors des procédures endodontiques ou chirurgicales. Grâce à son design fin et ergonomique, ce système procure une bonne visibilité et une aspiration précise tout au long du traitement.

Utiliser exclusivement cette pièce à main avec les embouts d'aspiration stériles à usage unique Suction Needles Transcodent®.


Exclusivement réservé à l'usage dentaire.

Instructions d'utilisation

1. Conception de Luer Lock Handpiece

Luer Lock Handpiece est une pièce à main en acier inoxydable au design ergonomique avec :

- un filetage de type Luer Lock (fixation par système de baïonnette) ;
- l'autre extrémité permettant de recevoir l'adaptateur fourni, pour le raccordement au système d'aspiration.

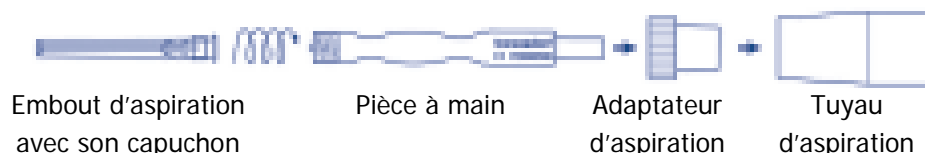

2. Préparation

Luer Lock Handpiece n'est pas vendue stérile. Avant la première utilisation, procéder à une prédésinfection et une stérilisation (voir paragraphe 4).

Fixer l'adaptateur sur la pièce à main Luer Lock Handpiece et le raccorder au système d'aspiration.

Sortir de son blister un embout d'aspiration stérile Suction Needle Transcodent® et le visser, muni de son capuchon, sur le filetage Luer Lock de la pièce à main.

Transcodent® recommande l'utilisation des embouts d'aspiration à usage unique Suction Needles Transcodent® des tailles suivantes :

Gauge 14 x 1 ½" (2,1 x 39 mm)

Gauge 16 x 1 ½" (1,6 x 39 mm)

Gauge 18 x 1 ½" (1,2 x 39 mm)

Gauge 20 x 1 ½" (0,9 x 39 mm)

Les embouts d'aspiration à usage unique Suction Needles Transcodent® sont particulièrement adaptés car ils sont faciles à plier du fait de leur conception en acier inoxydable annelé. Ils bénéficient par ailleurs d'un diamètre interne élargi. A usage unique, ils minimisent les risques de contamination et de contaminations croisées.

Luer Lock Handpiece est prête pour l'utilisation.

3. Manipulation

Luer Lock Handpiece s'utilise comme un stylo. Vous pourrez diriger l'extrémité de la canule sur la zone de traitement / de chirurgie pour une évacuation précise.

4. Nettoyage et entretien

Veillez suivre ces instructions pour maintenir votre Luer Lock Handpiece en parfaite condition de fonctionnement :

- Enlever l'adaptateur de la pièce à main et le nettoyer et le désinfecter immédiatement. Nettoyer l'adaptateur selon les instructions ci-jointes.

Luer Lock Handpiece peut être prédésinfectée ou immergée dans une solution compatible avec l'acier inoxydable.

En plus de la compatibilité de la solution de nettoyage et de désinfection, veuillez tenir compte du temps d'application et de la concentration indiqués par le fabricant ou le distributeur.

- **Nettoyage** : Luer Lock Handpiece est en acier inoxydable et peut être nettoyée avec tout autre instrument en acier inoxydable par tous procédés habituellement employés au cabinet dentaire. Immédiatement après la phase d'immersion, rincer abondamment Luer Lock Handpiece, puis la sécher complètement.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs, qui peuvent corroder ou laisser des dépôts à la surface des instruments.

- **Stérilisation (autoclave)** : Après nettoyage, placer Luer Lock Handpiece dans un sachet de stérilisation hermétique ou utiliser une cassette de stérilisation appropriée. Luer Lock Handpiece peut être stérilisée jusqu'à 136°C pendant au minimum 4 minutes, suivie d'un temps de séchage d'au minimum 6 minutes. Stérilisation optionnelle : jusqu'à 123°C pendant au minimum 32 minutes, suivie d'un temps de séchage d'au minimum 8 minutes.

Luer Lock Handpiece est en acier inoxydable et peut être stérilisée avec tout autre instrument en acier inoxydable par tous procédés habituellement employés au cabinet dentaire. Veiller à ce que les instruments soient séparés les uns des autres durant la stérilisation et le stockage. Ouvrir le sachet juste avant utilisation sur un Patient.

GARANTIE

Des procédures strictes de contrôle de qualité garantissent la fourniture en parfaite condition de cet instrument chirurgical pour son utilisation clinique. Votre Luer Lock Handpiece est garantie contre tous défauts structurels et de fabrication pendant **2 ANS** à compter de sa date d'achat. Cette garantie est caduque en cas de stérilisation inappropriée, de stockage ou d'utilisation incorrects.

En cas de retour de votre Luer Lock Handpiece, veuillez vous assurer d'y joindre sa facture d'achat, et la retourner auprès du Distributeur qui en a assuré la vente.

Bien que nos conseils techniques - verbaux ou écrits - soient donnés en toute bonne foi, notre responsabilité ne saurait être engagée, y compris lorsque des droits de propriété de parties tierces interviennent. L'utilisateur est tenu de vérifier que les produits que nous fournissons sont compatibles avec les procédures et l'usage qu'il compte en faire.