




Mettre le pistolet sous tension et attendre 1 minute que la température atteigne au minimum 200 °C. Saisir le pistolet comme illustré ci-dessus sans presser la gâchette.

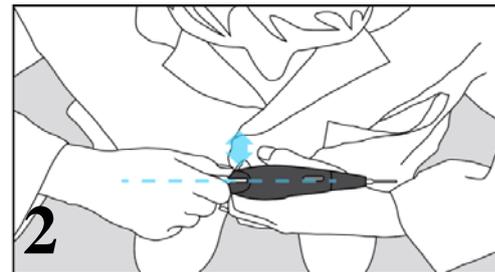

Tenir le pistolet à une distance de 2,5 à 5 cm de votre poitrine.

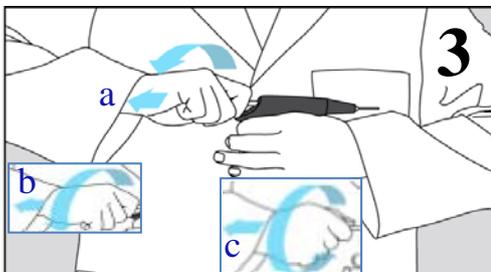

Tourner le piston pour le libérer, dès que vous commencez à le retirer.

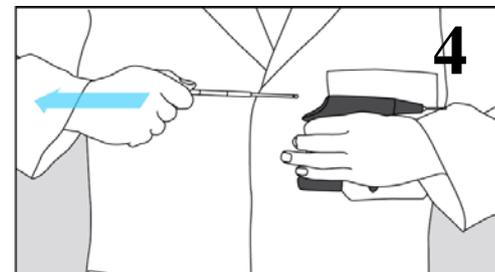

Retirer le piston dans l'axe du pistolet. Nettoyer la chambre à l'aide des brossettes de nettoyage tant que le pistolet est sous tension (Cf. instructions point 3 ci-dessous).

COMMENT NETTOYER VOTRE PISTOLET

1. Toujours retirer le piston après chaque utilisation (**tant que le pistolet est sous tension**) et nettoyer les résidus de Gutta Percha à l'extrémité du piston.
2. Après avoir terminé un cylindre de Gutta Percha en fin de procédure, régler la température à **200 °C**. Retirer le piston et mettre le pistolet hors tension.
3. **Après 1 minute**, insérer la brossette de nettoyage à l'arrière du pistolet et la faire rapidement ressortir par l'avant. Ne pas utiliser de produits chimiques sur la brossette.
4. **Essuyer tout résidu de matériau visible** sur le piston à l'aide d'une compresse imbibée d'alcool.